

機械器具 7 0 歯科用鋳造器
一般医療機器 歯科技工用ポーセレン焼成炉 JMDN35762000

デュオトロンPRO EX-6100

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造



2. 寸法・重量

寸法：幅×奥行×高さ：324×391×527mm
庫内：幅×奥行×高さ：110×110×100mm
重量：約 35kg

3. 電気規格

電圧/電流、周波数 AC220V/10A、50/60Hz
フューズ 30A/AC250V
最大消費電力 2.2kw(起動時)
電源プラグ形状 SE タイプ
電源コード長さ 約 2m

4. 性能又は機能※

最大温度 1,600℃（係留時間 30 分以上の場合は 1,580℃）
最大上昇温度 15℃/分
センサー計測範囲 0～1,760 度
周辺温度 2℃～35℃
作業温度 80%以下
プログラム数 15

【使用目的又は効果】

ジルコニアの焼成に使用する。

【使用方法等】

詳細な設置方法や使用方法については、付属の取扱説明書等を必ず参照すること。

1. 設置・接続方法

- 1) 本器の重量（約 35kg）に十分耐え得る水平な台に設置する。
- 2) 本体の電源スイッチが OFF になっていることを確認してから、電源コードをコンセントに接続する。

2. 使用方法

- 1) 焼結前に焼結物を乾燥させる。
- 2) 本機のスイッチをオンにする。
（本機背面の 2 つのスイッチを上げる）
- 3) ドアを開ける
- 4) （ピースを使用する際は）ピースを焼成台に入れ、焼結物を置く。
- 5) 庫内中央の焼成台に載せる。
- 6) 不純物が付着しない様、蓋をする。
- 7) 焼結スケジュールを選択する。選択すると「✓」がボタン

の左に表示され、緑色バックに変更となる。

- 8) 焼結準備が完了したら、「Start」をクリック。
- 9) 焼結完了後、「Finish」メッセージがモニターに表示される。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1) タコ足配線はしないこと。
- 2) 220V、10A 以上の電源を用意すること。
- 3) 本器を移動・運搬させる際は、取扱いに注意すること。
- 4) 本器の重量に十分耐え得る水平な台に設置すること。
- 5) 側面及び背面は、壁面より 30cm 以上、上面は 150cm 以上開けること。
- 6) 庫内は高温になるので触れないこと。
- 7) 使用中は換気を行うこと。
- 8) 使用直後の庫内は高温のため、直接手で焼成物や周辺に触れないこと。

【使用上の注意】

- 1) 引火性のものや可燃性のものを近くに設置しないこと。
- 2) 水のかかる場所に設置しないこと。
- 3) 換気の良い場所に設置すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- 1) 本材は高温、多湿及び、直射日光や水のかかるおそれのある場所を避けて保管すること。
- 2) 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）等、安定状態に注意して保管すること。
- 3) 本材は室温で、外圧(物理的負荷)を受けない場所に保管すること。
- 4) 化学薬品の保管場所や、塩分やイオウ分等のガスの発生する場所を避けて保管すること。

2. 耐用期間・有効期間

適正な保守点検及び修理が行われている場合に限り 5 年間とする。
ただし、耐用期間は使用条件・使用環境により異なる。

【保守・点検に係る事項】

詳細については取扱説明書をよく読むこと。

- 1) 本器使用中に異常を感じたら、直ちに使用を中止して、取扱説明書に従って点検又は修理依頼をすること。
- 2) 機器の点検や清掃を行う際は、電源プラグからコンセントを抜き、本器が完全に冷めてから行うこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

製造販売業者：サンデンタル株式会社
製造業者：Add-in Co., LTD.
国 名：大韓民国