

類 別：機械器具 54 医療用捲綿子

一 般 的 名 称：医療用捲綿子（JMDNコード：10172000）

ク ラ ス 分 類：一般医療機器（クラスⅠ）

販 売 名：咽頭捲綿子 ハルトマン

【警告】


・本器は医師、又は救命救急士等の適切な訓練を受けた習熟者以外は使用しないで下さい。

【禁忌・禁止】

・改造は絶対にしないで下さい。
・本製品を切削、打刻（刻印）等の二次的加工（改造）することは折損等の原因になるので、絶対に行わないで下さい。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造等

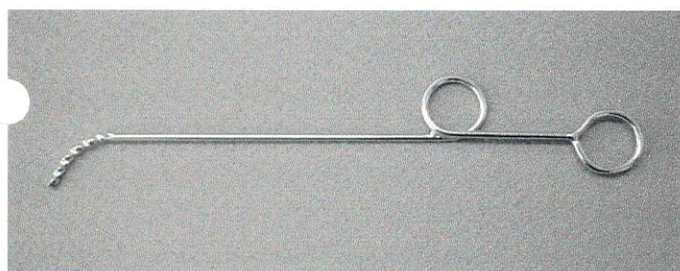

【使用目的・効能又は効果】

身体の一部及び体内に、薬剤を塗布または治療を適用すること、または検査のための試料を採取することを目的とした器具をいう。

【操作方法又は使用方法】

ロッドの先端部に綿を巻いて患部に塗布又は治療を適用する。

用時滅菌して使用する。

再滅菌して繰り返し使用する。

推奨滅菌方法：高圧蒸気滅菌

【使用上の注意】

その他の注意

- ・使用前に必ず洗浄による浄化又は消毒や滅菌を行って下さい。
- ・治療に必要な時間量を超えて操作・使用しないで下さい。
- ・患者が本器に触れないよう注意して下さい
- ・異常が見られた時は、患者に対して安全な状態で、本器の作動制限、又は停止等の適切な処置をして下さい。
- ・使用目的以外には使用しないで下さい。
- ・破損・曲がり等の原因になり得る必要以上の力（応力）を加えないで下さい。
- ・塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、腐食の原因になるので使用を避けて下さい。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

貯蔵・保管方法

- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所には保管しないで下さい。
- ・再汚染を防ぐ為、清潔な場所に保管して下さい。

【保守・点検に係る事項】

- ・ご使用後は次回の使用に支障がないよう必ずクリーニングして下さい。
- ・消毒や滅菌を行う前に、必ず洗浄による浄化を実行して下さい。
- ・洗浄は欠陥がない事を確認して下さい。
- ・ご使用前には点検を行って下さい。

【包装単位】

1セット入／袋

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

三祐医科工業株式会社

東京都足立区六木1丁目12番9号

TEL：03-3605-7842

FAX：03-3628-7411