

器具器械 5 1 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 吸引チューブ 1 6 7 7 9 0 0 0

吸引用接続チューブⅡ


再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品はポリ塩化ビニール（可塑剤：フタル酸ジ（２－エチルヘキシル））を使用している。

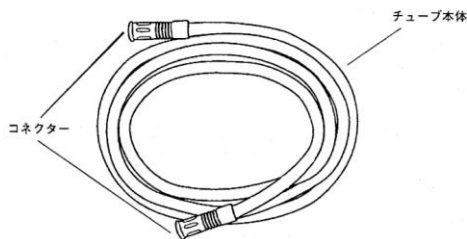

原理

吸引器、回収容器、吸引嘴管等との接続に用いる場合もある。

【使用目的又は効果】

本品は滅菌済み医療用チューブなので、包装から取り出した後、そのまま使用可能である。
本品は吸引器と回収容器との接続に用いる柔軟性のあるプラスチック製のチューブである。吸引嘴管との接続に用いる場合もある。

【使用方法等】

本品は手技に精通した医師の管理下で使用すること。
１、本品を使用する前に、包装及び本品の汚れ、破損等が無いことを確認する。
２、清潔操作で本品を滅菌包装袋から取り出し、吸引器、回収容器、吸引嘴管等に接続する。
３、本品を使用するラインの接続箇所に誤りが無く、確実に接続されていることを確認する。
４、使用后、本品を取り外す場合は、他の接続部が緩んだり、外れたりしないように注意して取り外す。

使用方法に関連する使用上の注意

１、本品を使用するラインの接続箇所に誤りが無く、確実に接続されていることを十分確認すること。
２、本品を折り曲げた状態や引っ張った状態で使用しないこと。
[機能が正常に働かない恐れや接続部が外れる恐れがある。]

【使用上の注意】

重要な基本的注意

１、包装が破損、汚損している場合や製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないこと。
２、内容物が正しく入っており、瑕疵の無いことを確認すること。
３、組み立て操作等の際に、汚染が起きないように注意すること。

４、本品を接続するラインの総ての接続箇所に緩み、外れが無いことを常に確認すること。
５、使用中は、チューブの折れによる閉塞に注意すること。
６、本品はディスポーザブル製品であるので、１回限りの使用のみで使い捨て、再使用しないこと。
７、包装を開封したらすぐに使用し、使用後は感染防止に留意し、安全な方法で医療用廃棄物として処分すること。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

水濡れに注意し、直射日光や高温多湿を避けて保管すること。

有効期間・使用の期限

使用期限は外箱に記載[自己認証（当社データ）による]

包装

１０本／箱、１５本／箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社サミック・インターナショナル
住所：東京都八王子市小宮町１ ７ １－１
電話番号：０４２－６４９－２３７３
外国製造業者：ホン アン メディカル アプライアンス (Hong An Medical Appliance Co., Ltd.)
外国製造業者国名：中国 (China)