

歯科材料 09 歯科用研削材料
歯科用研磨器材 (一般医療機器) JMDNコード 70907000

SSポリブルー

【形状・構造及び原理等】

形状: クリーム状

原理: 適度な粘性のペースト状のもので、義歯に使用されるレジ
ン及び金属を、主成分であるアルミナ成分により、仕上げ研
磨するものである。

外観: ペースト状

色調: クリーム青色

【使用目的又は効果】

補綴物等の研磨に用いる器材。

【使用方法等】

歯科技工の通法に従い、本品を用途に応じて適量取り、補綴物の
バフ磨きに使用する。

- ・義歯床の場合、レーズに布バフをセットしてから、義歯床に
本材を直接塗布しながらバフ磨きを行います。研磨後は水で
本材を十分に洗い流してください。
- ・義歯床以外、レジン及び金属材料の補綴物等の艶出しに使え
ます。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- ・研磨作業時は、粉塵による人体への影響を避けるために、局所
排気装置、公的機関が許可した防塵マスク等を使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ①本材は歯科医療有資格者以外が触れないよう適切に保管・管理
すること。
- ②室温保管(冷暗所の場所)すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 : (有) 齋藤歯研工業所

住所 : 〒520-0524

滋賀県大津市和邇今宿 817-1

電話番号 : 077-594-0584

FAX 番号 : 077-594-2669