医療機器届出番号: 25B2X00004000032 号

歯科材料 09 歯科用研削材料 歯科用研磨器材 (一般医療機器) JMDN コード 70907000

ミラーバフ

【形状・構造及び原理等】

形状:ホイール状

寸法:直径 75 mm、厚み 10 mm、中心径 3 mm

原理:本品は、歯科技工用電気レーズ等の回転器具に装着し、 研磨剤を塗布し、補綴物等(歯科技工物)の研磨を行う。

【使用目的又は効果】

補綴物等の研磨に用いる。

【使用方法等】

歯科技工用電気レーズ等の回転器具に取り付ける。研磨材を塗 布し、補綴物等の研磨を行う。中速回転以下で使用すること。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- ・研磨を行う際は、保護眼鏡、防塵マスク等を使用すること。
- ・本材を回転器具に取り付ける際は、回転器具のメーカー指示 に従って確実に装着すること。 ・使用前には必ず予備回転でテストし、回転ブレが無いことを
- 確認すること。
- ・使用の際は必ず研磨材を使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

・本品は高温多湿の場所は避けて保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 : (有) 齋藤歯研工業所 住所 : 〒520-0524

滋賀県大津市和邇今宿 817-1

電話番号 077-594-0584 FAX 番号 : 077-594-2669