

2016年 3月 第2版(新記載要領に基づく改訂)

2009年 10月 第1版

届出番号:23B3X00018000008

医 04 整形用品

一般医療機器 医療ガーゼ 13700000

滅菌医療ガーゼ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

綿 100%のガーゼ製品で、エチレンオキサイドガス滅菌済みです。

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする。

【使用方法等】

- 本品を滅菌袋より取り出し、そのまま直ちに1回限り使用する。
- 滅菌袋から開封したのものについては、使用したものとみなす。

【使用上の注意】

- 体内へ留意しないこと。
- 包装が開封、破損及び汚損している場合は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 保管方法:直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
- 有効期間:容器又は被包に表示【自己認証(自社データ)による】

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社酒井商店

愛知県名古屋市区城西 2-21-12

TEL 052-524-0615