

2016 年 3 月 第 2 版(新記載要領に基づく改訂)

2009 年 10 月 第 1 版

届出番号:23B3X00018000010

医 04 整形用品

一般医療機器 X 線造影材入りガーゼ 32374000

滅菌 X 線入医療ガーゼ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. X 線造影系を直接挟んで使用しないこと。
【切断又は抜け落ちて体内に残存する恐れがあるため】
3. 再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

綿 100%のガーゼに X 線造影系を織り込んだ製品です。
エチレンオキシドガス滅菌済みです。

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的として、X 線で検知可能な成分を含有する。

【使用方法等】

- 本品を滅菌袋より取り出し、そのまま直ちに 1 回限り使用する。
- 滅菌袋から開封したものについては、使用したものとみなす。

【使用上の注意】

- 体内へ留意しないこと。
- 包装が開封、破損及び汚損している場合は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 保管方法:直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
- 有効期間:容器又は被包に表示 【自己認証(自社データ)による】

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社酒井商店

愛知県名古屋市区城西 2-21-12

TEL 052-524-0615