

2016 年 3 月 第 2 版(新記載要領に基づく改訂)

2009 年 10 月 第 1 版

届出番号:23B3X00018000011

医 04 整形用品

一般医療機器 医療ガーゼ 13700000

Y カットガーゼ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

綿 100%のガーゼに Y 字の切り込みを入れた製品です。

【使用目的又は効果】

出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする。

【使用方法等】

- 適宜使用すること。
- 滅菌は高圧蒸気滅菌、EOG 滅菌ができる。

【使用上の注意】

- 体内へ留意しないこと、
- 包装が開封、破損及び汚損している場合は使用しないこと。
- 滅菌して使用する場合は、再滅菌しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び火気をさけ、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
株式会社酒井商店
愛知県名古屋市区城西 2-21-12
TEL 052-524-0615