

2016年 3月 第2版(新記載要領に基づく改訂)

2014年 10月 第1版

届出番号:23B3X00018000033

医 05 副木

一般医療機器 単回使用パッド入り副木 35357000

プロテクションスポンジ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

鉄線をポリウレタンフォームで被覆し、肌面にパイルを貼り付けた製品です。

パイルの材質:アクリル、綿

【使用目的又は効果】

身体の損傷部位を固定するために用いるパッド入り器具をいう。

本品は単回使用である。

【使用方法等】

- 適宜使用すること。
- 適切なサイズを選び、パイル面を肌側にして幹部に当てる。
- 包帯や粘着テープ等で固定する。

【使用上の注意】

- 皮膚過敏症の患者には慎重に使用すること。
- 破損、剥れのないことを確認してから使用すること。
- 本品の使用中に発赤、かゆみ、かぶれ、痛み等の症状が現れた場合は、直ちに使用を中止すること。
- 本品が破損した場合は、直ちに使用を中止すること。
- 本品の固定を行う場合、包帯や粘着テープをきつく巻きすぎないこと。
神経麻痺や血行障害をおこすおそれがあります。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に

保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社酒井商店

愛知県名古屋市区城西 2-21-12

TEL 052-524-0615