

一般医療機器 器 54 医療用捲綿子 10172000 医科用捲綿子

綿棒

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

軸の片側に綿体又は綿体ガーゼを接着させた綿棒です。

【使用目的又は効果】

身体の一部及び体内に薬剤を塗布すること、治療することを目的とする。

【使用方法等】

- ・薬剤を塗布する場合、綿体部に薬剤を含ませて使用すること。
- ・使用用途に合わせて、適切なサイズを選択すること。

【使用上の注意】

- ・直接患部に使用するとき、繊維が患部に残らないように注意すること。
- ・体内に留意しないこと。
- ・開封後は速やかに使用すること。
- ・本品を加工しないこと。
- ・軸に力を入れすぎたり、強く押しすぎたりしないこと。
- ・綿体の表面や内部に黄色または黒色の斑点状のものがみつかることがあるが、綿の実殻であるため使用上に支障はない。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

2. 有効期間

本品の使用期限は包装に記載。[自己認証(自社データ)による]

【製造販売業及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社酒井商店

〒451-0031 愛知県名古屋市中区城西 2-21-12

TEL 052-524-0615