

機械器具25 医療用鏡
一般医療機器 内視鏡用部品アダプタ 37090010

Y-アダプター BX10


再使用禁止

【禁忌・禁止】

1.使用方法
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、まっすぐなチャンネル及び隣接して湾曲しているサイドポートから構成され、内視鏡手術の際の灌流液逆流防止及び併用する泌尿器用デバイスの固定のために用いられる。回転式オス型ルアー、本体、逆流防止バルブ及び取り外し可能な青色ルアーシールで構成される。

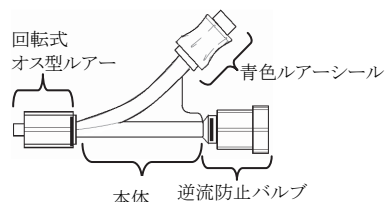

＜主な原材料＞

ポリカーボネート、エチレンプロピレンジエン、ミネラルオイル
シリコーン

【使用目的又は効果】

単一又は複数の内視鏡部品を接続・統合して完全な内視鏡アセンブリを作製したり、又は他の装置（レーザ等）の接続を可能にするために用いるコネクタや機能追加用パーツである。器具、カテーテル、液体等を導入したり、吸引するため、コック又は器具ポートに取り付けることができるものもある。

【使用方法等】

- (1) 青色ルアーシールを生理食塩液でフラッシュし、逆流防止バルブを開ける。
- (2) 内視鏡（本品に含まない）ワーキングチャンネルのメス型ルアーに回転式オス型ルアーを接続する。
- (3) 2.7 mm (8 F) 以下の泌尿器用デバイス（以下、デバイスという）を逆流防止バルブから内視鏡へと通すことが可能である。デバイスの動きを妨げないように、逆流防止バルブを閉じ、逆流を防止する。
- (4) 必要に応じて青色ルアーシールの接続を解除し、イリゲーションチューブ（本品に含まれない）を接続することができる。又は、接続された状態の青色ルアーシールから内視鏡に1 mm (3 F) 以下のデバイスを挿入することが可能である。
- (5) 逆流防止バルブと青色ルアーシールの両方のポートを使用する場合、デバイスを合わせた外径が2.7 mm (8 F) 以下であれば、デバイスを2本まで本品に挿入することができる。
- (6) デバイスを本品から取り外し、逆流防止バルブを閉じる。
- (7) 青色ルアーシール側ポートを通して使用したイリゲーションチューブ又はデバイスを取り外し、必要に応じて本品から液体を抜き取る。
- (8) 手術終了後、本品を内視鏡から外す。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

- (1) 逆流防止バルブを締め過ぎるとカテーテル（本品に含まない）、ガイドワイヤ（本品に含まない）又は他の治療用デバイスの操作を妨げる可能性がある。これらのデバイスは損傷を受けやすいことから、偶発的に破損する可能性を減らすためにも取扱いに注意を払うこと。また、操作中に抵抗が感じられた場合は、操作を中止してその原因を調べること。
- (2) 3本以上のデバイスを使用したり、2本であっても合わせた外径が2.7 mm (8 F) を超える場合、デバイス又は本品に損傷が生じる可能性がある。

【保管方法及び有効期間等】

1.保管方法

高温、多湿、直射日光を避けて保管し、有機溶媒、電離性放射線又は紫外線に曝さないこと。

2.有効期間

3年[自己認証による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社

電話番号:03-6853-1000

製造業者:

米国 ボストン・サイエンティフィック コーポレーション

[Boston Scientific Corporation]