


チューブクランプ

【禁忌・禁止】

本品は再使用可能ですが乾燥工程で乾燥温度の設定機能の無いオートクレーブでの滅菌は出来ません。又、直径1～8mm、肉厚1mm以下の軟質のチューブにしか使用できません。

【形状・構造及び原理等】

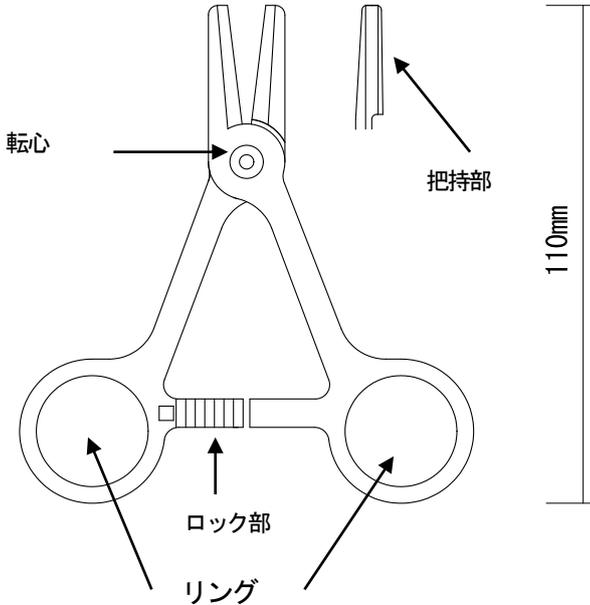

材質：本体 硝子粉体入りナイロン 耐熱温度132℃

転心 ハトメ 真鍮

原理：転心を軸に対象物を挟み込み、ロック部に咬みつかせることにより挟み込みを維持させる。

【使用目的又は効果】

本品は、チューブを遮断するための器具である。又、医療施設で使用する汎用のものである。本品は再使用可能である。

【品目仕様等】

本品は1～8mmの軟質チューブを把持し遮断する。

【使用方法等】

1. 本品の把持部でチューブを保持し、リングに挿入した親指と人差し指でロックします。
2. ロックを外すときはリングを上下にずらしますと解除できます。

【使用上の注意】

1. 本品は再使用可能ですがオートクレーブでの滅菌は耐えられませんが、乾燥装置に温度保証のない機器では変形する可能性があります。EOGガス滅菌、消毒用アルコールでの消毒は可能です。
2. 本品は1～8mm、肉厚が1mm以下の軟質のチューブに適應するために製造されました。これ以上の太さのもの及び硬質なものには適應しません。決してご使用にならないで下さい。

【保管方法及び有効期間等】

常温で保管し直射日光等当たらない場所で保管してください
標準的な使用期間の目安：3年（自己認証による）

【保守・点検に係る事項】

消毒・清掃は消毒用アルコールの清拭をお願いします。
尚、シンナーなどの有機溶剤は使用しないでください。

【包装】

包装単位 1本

【製造販売業者】

製造業者名 株式会社 三 恵

住 所 千葉県市原市八幡海岸通1969-33, 34

電話番号 0436-41-1820