

*2021年04月01日(第8版)

**2021年07月01日(第9版)

鉗子

鉗子

一般医療機器

JMDN:10861001


【禁忌・禁止】

本品は再使用可能ですが、乾燥した状態で保管しめんと錆びる可能性があります。

【保管方法及び有効期間等】

常温で保管し直射日光等当たらない場所で保管してください。
標準的な使用期間の目安：3年（自己認証による）

【形状・構造及び原理等】

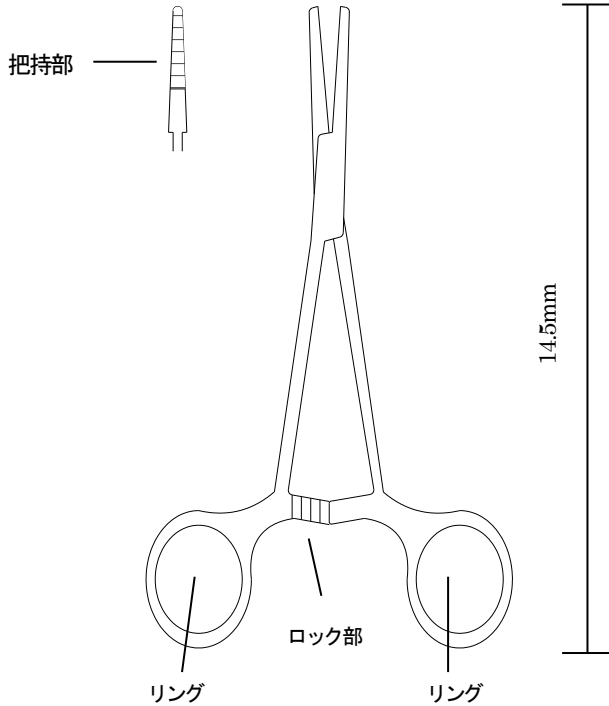

【保守・点検に係る事項】

乾燥した状態で保管してください。又、高温、多湿の場所を避けてください。錆びる可能性があります。
消毒・清掃は消毒用アルコールの清拭をお願いします。
尚、シンナーなどの有機溶剤は使用しないでください。

【包装】

包装単位 1個

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者名 株式会社 三 恵
住 所 千葉県市原市八幡海岸通1969-33, 34
電 話 番 号 0436-41-1820

製造業者名 トウネブラザーズ
パキスタン
Towne Brothers (Private) Ltd.

本体	ステンレス 全長 14.5cm
----	-----------------

【原理】

交差する支点により対象物を挟み込み、ロック部に咬みつかせることにより挟み込みを維持させる。

【使用目的又は効果】

臓器、組織又は血管を非外傷性に把持、結合、圧迫又は支持するために用いる手術器具をいう。本品は再使用可能である。

【品目仕様等】

組織及び血管を非外傷性に把持し支持することが出来る。

【使用方法等】

把持部で組織及び血管を挟み、ロックすることによって把持する。

【使用上の注意】

本品は再使用可能です。消毒はオートクレーブ、EOGガス滅菌が可能です。
但し、高圧蒸気滅菌にて本品を滅菌した場合、色落ちすることがあります。