

スタンダードピンセット


【禁忌・禁止】

本品は再使用可能ですが、乾燥した状態で保管しませんと錆びる可能性があります。

【保管方法及び有効期間等】

常温で保管し直射日光等当たらない場所で保管してください。
標準的な使用期間の目安：3年（自己認証による）

【形状・構造及び原理等】

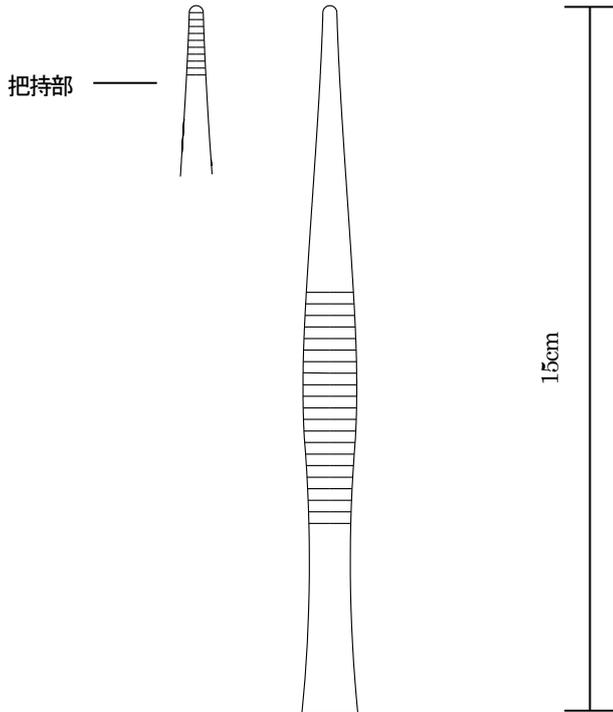

【保守・点検に係る事項】

乾燥した状態で保管してください。又、高温、多湿の場所を避けてください。錆びる可能性があります。
消毒・清掃は消毒用アルコールの清拭をお願いします。
尚、シンナーなどの有機溶剤は使用しないでください。

【包装】

包装単位 1個

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者名 株式会社 三 恵
住 所 千葉県市原市八幡海岸通1969-33, 34
電 話 番 号 0436-41-1820

製造業者名 トウネブラザーズ
パキスタン
Towne Brothers (Private) Ltd

本体	ステンレス 全長15cm
----	--------------

【使用目的又は効果】

保持する物体を閉じて挟む2枚の刃を持つ手術器具をいう。
ハンドルは永久的に結合している。

【品目仕様等】

保持しようとする物体を把持し支持することが出来る。

【使用方法等】

把持部で保持しようとする物体を挟み、把持する。

【使用上の注意】

本品は再使用可能です。消毒はオートクレーブ、EOGガス滅菌が可能です。