


ECGケーブル ECGA-C10BI

JMDN: 35562010

【禁忌・禁止】

- ・可燃性麻酔ガス及び高濃度酸素雰囲気内では絶対に使用しないでください
- ・MRI装置等強い磁気を与えるような機器と併用しないでください。
MRI検査を行う際は本装置は全て取り外してください。
- ・本品は分解・改造等行わないでください。
- ・異常が発見された場合は速やかに機器を取り外し適切な措置を講じてください
- ・医師または医師の指示を受けた者以外は使用しないでください。

【形状・構造及び原理等】

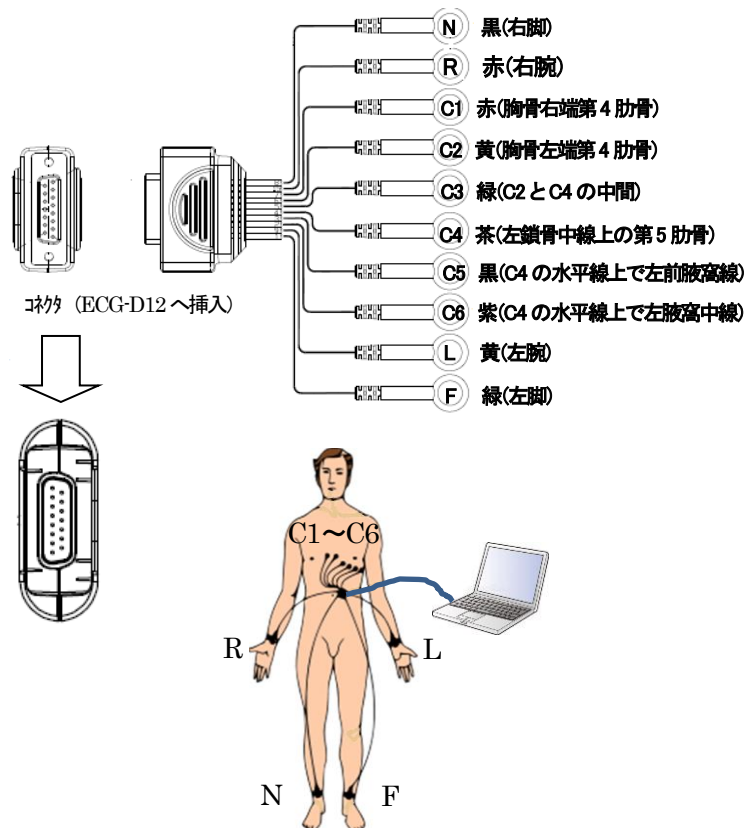

ケーブル長さ: 1200 mm (最長) バナナプラグ径: 4 mm

【原理】

ケーブルを通じて体表の電気信号を心電計 (ECG) へ伝達する。

【使用目的又は効果】

本品は心電図検査において患者の心電図信号を心電計 (ECG-D12) に伝達するケーブルで、別途先端へ別売の四肢及び胸部電極を装着し患者体表へ取付ける。

【使用方法等】

患者へ電極を取り付け、本品のプラグ部を電極に接続しコネクタを ECG-D12 機器本体のコネクタ部に接続し心電図を検査する。

【使用上の注意】

- ・本品を電極から取り外す際は、必ずプラグの頭を持って外してください。
(コードを持って引き取ることで断線のおそれがあります。)
- ・本品を ECG 本体から取り外す際は、必ずコネクタ部を持って外してください。
(コードを持って引き取ることで断線のおそれがあります。)
- ・ECG-D12以外の機器へ接続しないでください。
- ・ケーブルは強くねじったり、引っ張らないでください。
- ・ケーブルの取り扱いで挟んだり、上にものを置いたりしないでください。
- ・破損 (変形、傷、ねじれ等) 及び断線の可能性が生じた場合は使用しないでください。
- ・フックに引っ掛けた状態で長時間放置しないでください。
- ・包装物は保管しておいてください。修理・交換等の際に必要になります。
(折り目が付いて断線になる可能性が高くなります)
- ・機器に不具合が発生した場合は速やかに「使用禁止」等表示を行い、購入先等へ連絡してください。
- ・しばらく使用しなかった機器を再使用する場合は、使用前に必ず端子等のサビ・くすみ等接触が不十分にならないことを確認してください。
- ・廃棄する場合には、各自治体または当該施設の基準に従ってください。
感染のおそれや環境に影響を及ぼす可能性がある場合でも感染性廃棄物として上記同様に処理を行ってください。

【保管方法及び有効期間等】

1) 保管方法・保管環境

- ・水がつかぬ場所や薬品保管場所等に保管しないでください。
動作環境: 温度 10℃~40℃ 湿度 15%~80%
保管環境: 温度 -20℃~50℃ 湿度 15%~80% (結露無きこと)

2) 使用期間

標準的な使用期間の目安: 2年 (自己認証による)

【保守・点検に係る事項】

- ・有機溶剤・アルコール・消毒液・逆性石鹼等を用いて洗浄には使用しないでください。
- ・水分が機器に入らないようにして水で薄めた中性洗剤を含ませた清潔な布により清掃し清掃後はよく乾燥させてください。
- ・清掃の際は、ケーブルを持って清拭しプラグやコネクタを引っ張るようにしないでください。
- ・蒸気、EOG 等の高温滅菌は行わないでください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 三 恵
住所 千葉県市原市八幡海岸通 1969-33, 34
電話番号 0436-41-1820
製造業者 BRITEMED TECHNOLOGY INC.
国名 台湾