

胸部電極 ECG-KD01

JMDN: 42489000

【禁忌・禁止】

- ・可燃性麻酔ガス及び高濃度酸素雰囲気内では絶対に使用しないでください。
- ・MRI装置等強い磁気を与えるような機器と併用しないでください。
MRI検査を行う際は本装置は全て取り外してください。
- ・本品は分解・改造等行わないでください。
- ・異常が発見された場合は速やかに機器を取り外し適切な措置を講じてください。
- ・医師または医師の指示を受けた者以外には使用しないでください。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造



包装: 6個入り/1箱

2. 原理

本品は、心臓の活性電位を体表面から導出するための電極として機能する。

【使用目的又は効果】

本品は心電図検査において患者の体表電気信号を心電計に伝達する導体であり所定の胸部位置に装着することを目的とする電極で、ECGケーブルを接続することにより心電計で波形として処理される。

本品は再使用可能な電極である。

【使用方法等】

- 1) 本品を使用する際は、対象となる心電計等の取扱説明書を確認してください。
- 2) 患者の電極取付け部（胸部装着部位）は事前にアルコール等で清拭し、心電図用ペースト等のクリームを塗ってください。
- 3) 胸部電極にECGケーブル先端のプラグを確実に装着してください。
- 4) 本品を胸部装着部位には確実に吸着するようにしてください。

【使用上の注意】

- ・本品を取り外す際は、必ず電極を持って外してください。
(コードを持って引き取ると断線のおそれがあります。)
- ・本品をECGケーブルから取り外す際は、必ずコネクタ部を持って外してください。(コードを持って引き抜くと断線のおそれがあります。)
- ・心電計以外の機器へ接続しないでください。また他の電極との併用は行わないでください。
- ・本品は強くねじったり、引っ張ったり過度の衝撃を加えないでください。
- ・心電計の取扱説明書にて指定する注意事項を遵守してください。
(除細動や電気メス併用時に熱傷になる危険性があるため。)
- ・破損(変形、傷、ねじれ等)可能性が生じた場合は使用しないでください。
- ・フックに引っ掛けた状態で長時間放置しないでください。

- ・機器に不具合が発生した場合は速やかに「使用禁止」等表示を行い、購入先等へ連絡してください。
- ・しばらく使用しなかった機器を再使用する場合は、使用前に必ず端子等のサビ・くすみ等接触が不十分にならないことを確認してください。
- ・感染のおそれや環境に影響を及ぼす可能性がある場合でも感染性廃棄物として上記同様に処理を行ってください。
- ・廃棄する場合には、各自自治体または当該施設の基準に従ってください。

【保管方法及び有効期間等】

1) 保管方法・保管環境

- ・水がかかる場所や薬品保管場所等に保管しないでください。
動作環境: 温度 10℃~40℃ 湿度 15%~80%
保管環境: 温度 20℃~50℃ 湿度 15%~80% (結露無きこと)

2) 使用期間(本品は消耗品の為、必要に応じ交換してください)

標準的な使用期間の目安: 1年 (自己認証による)

【保守・点検に係る事項】

- ・使用する前には吸着部/接続部や電極/センサー部の劣化/破損汚れ等を確認して波形が正常に表示されることも確認してください。
- ・有機溶剤・逆性石鹼等を用いて洗浄には使用しないでください。
- ・水分が機器に入らないようにして消毒用アルコールを含ませた清潔な布により清掃し清掃後はよく乾燥させてください。
- ・使用後、患者より取り外した後、清掃の際は、ECGケーブルより取り外し、清拭し吸着部を引っ張るようにしないでください。
- ・蒸気、EOG等の高温滅菌は行わないでください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 三 恵
住所 千葉県市原市八幡海岸通1969-33, 34
電話番号 0436-41-1820

製造業者 Shenzhen Med-link Electronics Tech
CO., LTD,
国名 中国