

類別:機械器具62 歯科用切削器
一般的名称:歯科用研削器材 JMDNコード:70908000

販売名:クリーンアップブラシ

*【禁忌・禁止】

- ① 形状変更や改造をしないこと。
- ② 本製品に異常や劣化が見られた場合には、使用を中止すること。
- ③ 本製品にアレルギーを示す患者には使用しないこと。

*【形状・構造及び原理等】

1.形状、構造

[ブラシホルダー]

KY-BH



ブラシ接続部

取付ネジ部

YY-BH



ブラシ接続部

取付ネジ部

軸材質:ステンレススチール

[ブラシ]

KY-FB KY-CB KY-FM KY-CM



ブラシ部:ナイロン

軸材質:ステンレススチール

[専用ハンドル代表例]



2.包装

各タイプ	チップ	1個	/	包
	ハンドル	1本	/	包

【使用目的又は効果】

口腔内清掃及び歯周治療時に歯の表面から歯石等の沈着物を除去するために用いる。

*【使用方法等】

1. ブラシホルダーにブラシ部をねじ込み式で取り付ける。
2. ブラシホルダーをハンドルにねじ込み式で取り付ける。
3. ネジ部に緩みがないことを確認し、切削後の沈着物を除去する。

【使用上の注意】

- 1.使用前に本体にキズ、ひび割れがないことを確認すること。
- 2.使用の際は、保護眼鏡などを着用すること。
- 3.使用の際は過度の圧力をかけずに使用のこと。
- 4.金属を腐食させる場合があるので以下の物質を使用しないこと。
次亜塩素酸ナトリウム、ポピドンヨード、ホルマリン、グルコン酸クロルヘキシジン、超酸性水
- 5.薬品消毒を行う場合は薬剤の添付文書に書かれた注意事項を守ること。
- 6.一人一人の患者さん使用後毎に、ハンドルから取り外し、精製水等を用いて器具に付着した血液、体液、組織片を速やかに除去すること。
- 7.防錆のため、洗浄後は歯科用の防錆効果をもたせた薬剤を用いて、洗浄のこと。
- 8.洗剤の残留がないよう、十分にすすぎ、十分乾燥させること。
- 9.乾燥後は感染防止の為、必ずオートクレーブ等で滅菌すること。
135℃ 30分推奨
推奨以上の高温乾燥や、アルコールを利用したオートクレーブは変質、変形、変色、劣化する場合があるため、使用しないこと。
- 10.金属疲労などで破損の恐れがあるため長期間使用をしないこと。
- 11.ブラシの取り付けは口腔外で行い、しっかりと取り付けられていることを確認すること。

【保管方法及び有効期間等】

高温・多湿・直射日光及び水濡れを避け室温で保管すること。
ブラシホルダーは9～12ヶ月で交換してください。

※商品寿命は使用頻度と取扱い方法により変わります。

*【取扱い上の注意】

1. 器具を著しく低下させるので粗雑な取扱いをしないこと。
2. 溶解や破損の原因となるため、器具をヒートリングしないこと。
3. 形状が変形した場合は交換すること。

*【保守・点検に係る事項】

1. 使用前、使用後は本体に破損、先端部のキズ、ひび、割れ腐食がないことを確認すること。
これらがある場合は使用を中止すること。

【製造業者及び製造販売業者の氏名又は名称等】

株式会社サンテクノ
住所 千311-3501 茨城県行方市芹沢995番地1
連絡先 電話 0299-36-2511
FAX 0299-36-2533

※本品は、改善・改良の為予告なしに仕様・形態・材質等が変更される場合があります。

※A4版添付文書が必要な方はお申し出ください。