

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN70907000
クリスタルサンド

【形状・構造及び原理等】

形状：粉末
製粉：酸化アルミナ

【使用目的又は効果】

補綴物などの研磨に用いる。
金合金、白金加金、金銀パラジウム合金
コバルトクロム合金、チタン合金のレーズ研磨用

【使用方法等】

本品に水を加え泥状にしたものを補綴物に塗布し、技工用
レーズに取り付けたブラシ等で研磨する。

【使用上の注意】

〔使用注意〕

- ・本品を扱う際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
- ・本品を荒れ性の方が使用する場合、又は長時間使用する場合は、手袋等を使用すること。
- ・本品は【使用目的又は効果】の項に記載した用途以外には使用しないこと。
- ・本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

〔重要な基本的注意〕

- ・本品が目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、直ちに大量の水で洗浄した後、眼科医の診断をうけること。

【保管方法及び有効期限等】

〔保管方法〕

- ・本材は高温多湿の場所を避けて保管すること。
- ・本材は歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【包装】

1kg／袋 2kg／袋

【製造業者又は製造販売業者の氏名又は名称等】

【製造販売業者】 株式会社サポート
住所 〒581-0845
大阪府八尾市上之島町北 1-60-3
電話番号 072-923-0139