


歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科技工用アブレンシブ研削器具 JMDN70901000
トリマー砥石

【形状・構造及び原理等】

形状

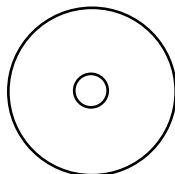

原理

本材は、歯科技工用のアブレンシブディスクで、適合する技工用トリマーに装着して回転させ、石膏模型を本材のディスク面に軽く押し付けることで、石膏のトリミングを行うことができる。

仕様

材質: アルミニウム砥粒・中目
外径: 230 mm センターホール: 22 mm

【使用目的又は効果】

石膏模型のトリミングに使用する。

【使用方法等】

使用前に付属の取り扱い説明書を必ず読むこと。

- 1) 本材のディスクを、トリマーに取り付けネジをしっかり締めて固定する。
- 2) トリマーのフロントカバーを閉めた後、スイッチを入れて予備回転を行い、振れ等の異常がないことを確認する。
- 3) 本体作動後、すぐにトリミングをしないで、ディスク面に水が供給されていることを確認してから、作業を始める。
- 4) トリミングは、石膏模型をワークテーブルに置いて、ディスク面に軽く押し付ける。
- 5) トリミングの手順は、まず石膏模型の基底部から、側面、後方、隅角部、そして前面部の順で行う。

【使用上の注意】

- 1) 使用前に予備回転を行い、振れやガタ等がないことを確認すること。
- 2) 始動後、すぐにトリミングをしないで、ディスク面に水が供給されていることを確認してから作業を行うこと。
- 3) トリミング時は、目の損傷を防ぐ為に保護メガネを使用すること。
- 4) 排気装置を備えた環境で作業し、公的機関が認可した防塵マスクを使用し、粉塵を吸入しないこと。
- 5) 石膏模型をディスク面に強く押し付けると模型とディスク面の間の水の流れを遮ることで、ディスクに目詰りが起こり、トリミングの効率を減少させる。
- 6) トリミングはディスク全体を均等に使い一定の箇所に集中させないこと。
- 7) ディスク面に固着した石膏クズは、速やかに取り除くこと。

9) 石膏以外の物を削らないこと。・ディスクの切削性が著しく低下する。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) ディスク面の石膏クズをキレイに洗浄して乾燥させ、再使用可能な状態にして保管すること。
- 2) 高温、多湿、埃、塩分、イオウ分等を含んだ空気などにより、悪影響を生ずる恐れのない場所に保管すること。
- 3) 本材は室温で、傾斜や落下の危険がない、また外圧(負荷、振動、衝撃)を受けない場所に安定状態で保管すること。
- 4) 化学薬品の保管場所や、ガスの発生する場所を避けて保管すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 保守
トリミング後は、速やかにディスク面に付着した石膏クズをキレイに洗浄して乾燥させ、常に再使用可能な状態に保つこと。
2. 点検
本材に、損傷(ヒビ割れ、磨耗、変形)等の不良状況が生じていないか、使用の前後常に点検すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売業者】 株式会社サポート
住所 〒581-0845
大阪府八尾市上之島町北 1-60-3
電話番号 072-923-0139