

歯科材料 09 歯科用研削材料

一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 JMDN70903000

サポート T i ポイント

【警告】

- ・最高許容回転数は下記のとおり
S タイプ 30,000 回転
F タイプ 20,000 回転
を超えて使用しないこと

【形状・構造及び原理等】

形状：スティック型

S タイプ（砲弾型）



F タイプ（円柱型）



成分：炭化ケイ素及び合成ゴム

【使用目的、効能又は効果】

ゴム基材で結合されたアルミナを研磨成分とする歯科用研磨材です。

【使用方法等】

歯科技工用エンジンやレーズモーター等に軸部を装着し、回転させることにより、歯科技工物の研削及び研磨を行う。

最高回転数：S タイプ 30,000 r p m

F タイプ 20,000 r p m

【使用上の注意】

- ・ハンドピースメーカーの指定に従ってシャンク（軸部）を確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認する。
- ・作業に入る前に必ず安全な方向に向けて空回転させ軸振れその他の危険を取り除く。
- ・無理な角度や過度の加圧下での使用は避ける。
- ・研削又は研磨を行う場合は集塵装置。公的機関が認定した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないようにする。
- ・研削又は研磨を行う際は、保護メガネ等を使用し、万一、粉塵などが入った場合には、直ちに大量の水で洗浄した後、専門医（眼科医）の診断を受ける
- ・歯科医療有資格者以外は使用しない。

【保管方法及び期間等】

- ・水分、腐食性液剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的付加）及び汚染を受けないように保管すること。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること

【製造業者又は製造販売業者の氏名又は名称及び住所等】

【製造販売業者】 株式会社サポート

住所 〒581-0845

大阪府八尾市上之島町北 1-60-3

電話番号 072-923-0139