

2005年4月1日（新様式第1版）

届出番号 34B3X10002111112

医04 整形用品
一般医療機器 医療脱脂綿 70975000

SCプレスコットン

再使用禁止

【警告】

- 体内に留置しないこと

【禁忌・禁止】

- 本品は1回使用とする
- 再使用はしないこと

【形状・構造及び原理等】

綿100%の脱脂綿

本品は、白色の繊維状の軟毛で、におい及び味はない。
セルロースの親水性及び中空構造により吸水性を有し、液体の吸収を行う。

【使用目的、効能又は効果】

医薬品を塗布したり、患者の体表から少量の体液を吸収したりする等、医療目的に使用するパッド状の綿繊維からなる材料をいう。

【使用方法等】

使用目的に応じ、適宜使用する。
創傷面には滅菌して使用する。
滅菌は高圧蒸気滅菌、EOG滅菌ができる。

【使用上の注意】

本品の使用は1回限りです。再使用はしないで下さい。
体内に留置しないこと。
使用後は感染防止に留意し、衛生的に処理してください。

【保管方法及び使用期間等】

水濡れに注意し、直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売業者 株式会社 サンヨーコーポレーション
及び製造業者 広島県東広島市豊栄町安宿 3620 番地
TEL 082-432-3535