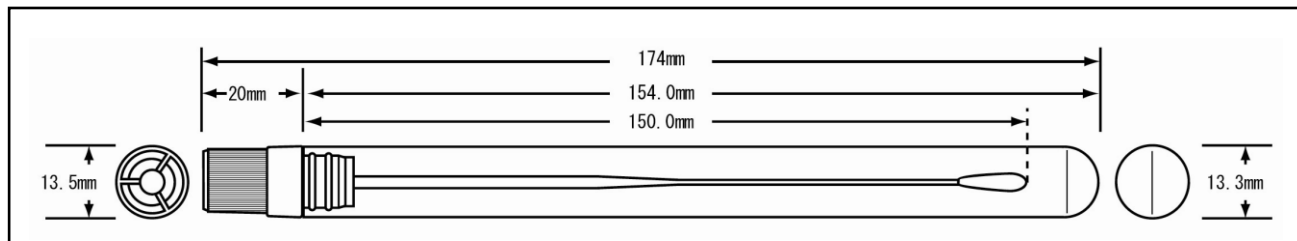


機械器具 54 医療用捲綿子
一般医療機器 医科用捲綿子 10172000

再使用禁止

ワイプチェックPA1503P**【禁忌・禁止】**


- 再使用禁止【単回使用のため】
- 目的外使用禁止

【形状・構造及び原理】


本品はポリプロピレン製の軸と、ポリエステル製綿球からなる医科用捲綿子 1 本がセットされたキャップと試験管・ラベル 1 枚、台紙 1 枚がセットになっています。(放射線照射済)

【使用目的又は効果】


検査のための試料を採取する医科用捲綿子と検体保存容器です。

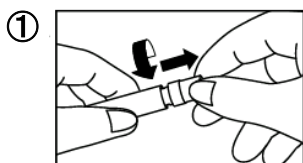【使用方法】

① 袋を開け、チューブのキャップを
ねじって開ける。

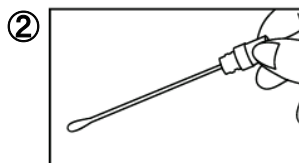

② キャップ付綿棒を取り出し、
検体を採取する。

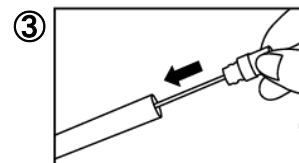

③ 検体を採取した綿棒をチューブに入れ、
キャップを閉める。

【使用上の注意】

- 1・本品は検体を採取するための医科用捲綿子です。その他の用途に使用しないでください。
- 2・検体の採取は、使用方法を読んで実施すること。
- 3・綿棒を強く押ししたり、過剰に折り曲げると基軸が折れる場合がありますので注意すること。
- 4・検体は速やかに検査すること。保存する場合は冷所に保存すること。
- 5・検体採取、保存輸送以外には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・保管方法：室温保存
- ・有効期間：3 年
放射線照射済

【包装】

- ・パッケージに入り数を記載
- ・製造番号・使用期限：包装袋ラベルに記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：
有限会社佐藤化成工業所
栃木県日光市岩崎 1471
TEL 0288-27-0184
FAX 0288-27-0253