

機械器具 54 医療用捲綿子
一般医療機器 医科用捲綿子 10172000


再使用禁止

ワイプチェック GME

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止【単回使用のため】
- 目的外使用禁止

【形状・構造及び原理】

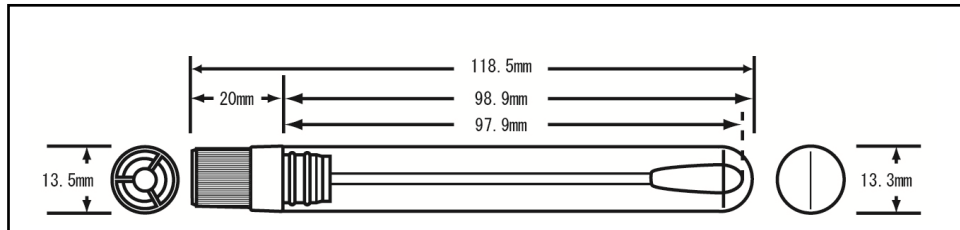


本品はポリプロピレン製の軸と、ポリエステル製綿球からなる医科用捲綿子 1 本がセットされたキャップと試験管、添付文書(台紙) 1 枚がセットになっています。(放射線照射済)

【使用目的又は効果】

検査のための試料を採取する医科用捲綿子と検体保存容器です。


【使用方法】

①

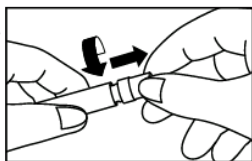


袋を開け、チューブのキャップを
ねじって開ける。

②

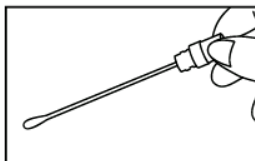

キャップ付綿棒を取り出し、
検体を採取する。

③

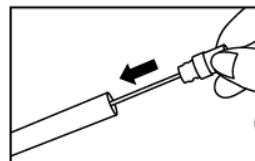

検体を採取した綿棒をチューブに入
れ、キャップを閉める。

【使用上の注意】

- 1・本品は、検体を採取する医科用捲綿子です。その他の用途に使用しないでください。
- 2・検体の採取は、使用方法を読んで実施すること。
- 3・綿棒を強く押したり、過剰に折り曲げると基軸が折れる場合があるので注意すること。
- 4・検体は速やかに検査すること。保存する場合は冷所に保存すること。
- 5・検体採取、保存輸送以外には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間】

- ・保管方法：室温保存
- ・有効期間：3 年
放射線照射済

【包装】

- ・パッケージに入り数を記載
- ・製造番号・使用期限：包装袋ラベルに記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

有限会社 佐藤化成工業所
栃木県日光市岩崎 1471
TEL 0288-27-0184
FAX 0288-27-0253