

機械器具 54 医療用捲綿子
一般医療機器 医科用捲綿子 10172000

再使用禁止


エスティックPX1508PZ

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止【単回使用のため】
- 目的外使用禁止

【形状・構造及び原理等】

外観図

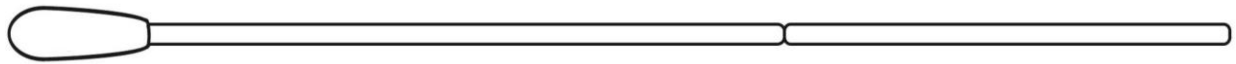

ポリエステル製綿球

スリット

ポリプロピレン製軸

本品はエチレンオキシドガス滅菌済みの医科用捲綿子である。
ポリプロピレン製の軸とポリエステル製の綿球から構成されている。

【使用目的又は効果】

検査のための試料を採取、又は薬剤を塗布するための医科用捲綿子です。

【使用方法】

- ・先端部の綿球で検体の採取、又は薬剤を塗布する。
- ・検体を採取後に、軸部のスリットから折ることで試験管に収めることが可能です。

【使用上の注意】

- 1・本品は検体を採取、又は薬剤を塗布するための医科用捲綿子です。他の用途には使用しないでください。
- 2・本品はエチレンオキシドガス滅菌済みです。包装が破損・汚損している場合は使用しないでください。
- 3・開封後は速やかに使用してください。
- 4・綿棒に破損、折れ、曲がり、汚損等のある場合には使用しないで下さい。
- 5・使用期限が過ぎた製品は使用しないでください。
- 6・本品の再使用はできません。単回使用を守って使用してください。
- 7・本品を使用する際には、力を入れすぎたり強く押し付けすぎたりして軸を折らないように注意してください。

【保管方法及び有効期間等】

- ・保管方法：室温保存
- ・有効期間：3 年
エチレンオキシドガス線滅菌済

【包装】

パッケージに入り数を記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：
有限会社佐藤化成工業所
栃木県日光市岩崎 1471
TEL 0288-27-0184
FAX 0288-27-0253