

届出日：2020 年 08 月 03 日（初版）
改訂日： 年 月 日（第 版）

製造販売届出番号 09B3X00006000057

機械器具 54 医療用捲綿子
一般医療機器 医科用捲綿子 10172000


再使用禁止

エススティック PAX1583PZS

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止【単回使用のため】
- 目的外使用禁止

【形状・構造及び原理】

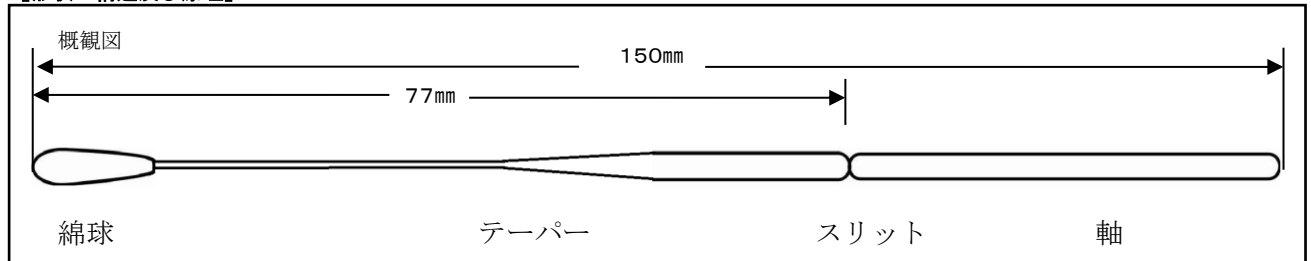

本品はE O G滅菌済みの医科用捲綿子である。
ポリプロピレン製の軸とポリエステル製の綿球から構成されている。

【使用目的又は効果】

検査のための試料を採取、または薬剤を塗布するために使用する。

【使用方法】

- ・先端部の綿球で検体を採取、または薬剤を塗布する。
- ・検体を採取後に、軸部のスリットから折ることで試験管に納めることが可能です。

【使用上の注意】

- 1・本品はE O G滅菌済みです。包装が破損・汚損している場合は使用しないでください。
- 2・包装を開封後は速やかに使用してください。
- 3・綿棒に破損や折れ曲がり、汚損などがある場合には使用しないで下さい。
- 4・有効期限が過ぎた製品は使用しないでください。
- 5・本品の再使用はできません。単回使用を守って使用してください。
- 6・本品を使用する際には、力を入れすぎたり強く押しすぎたりして軸を折らないように注意してください。

【保管方法及び有効期間】

- ・保管方法：室温保存
- ・有効期間：3 年
E O G滅菌済

【包装】

パッケージに入り数を記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：
有限会社佐藤化成工業所
栃木県日光市岩崎 1471
TEL 0288-27-0184
FAX 0288-27-0253