


【禁忌・禁止】

- 再使用禁止【単回使用のため】 ●目的外使用禁止

【形状・構造及び原理】

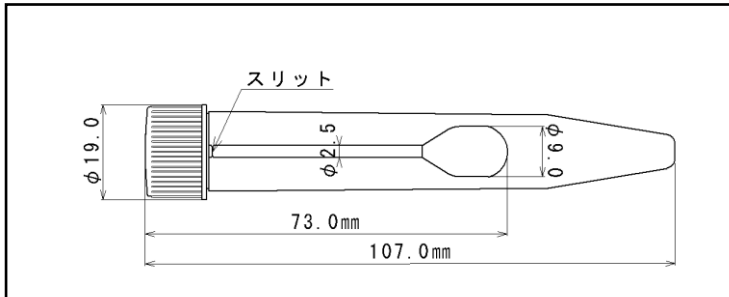

本品はポリスチレン製の軸と、ポリエステル製綿球からなる医科用捲綿子 1 本がセットされたキャップ、試験管である。


【使用目的又は効果】

検査のための唾液を採取する医科用捲綿子と検体保存容器です。

【使用方法】


①

試験管から綿棒を取り出し綿棒を静かに口の中（舌下）に含み、自然に分泌される唾液を十分に染み込ませます。

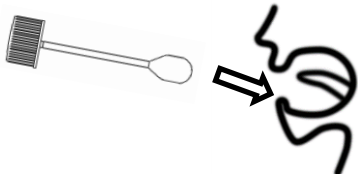


②

綿棒の部分が他のモノに触れないように注意しながら、速やかにチューブに綿棒を戻し、しっかりキャップを締めて下さい。

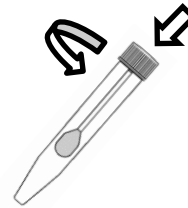


③

試験管を遠心分離機にかけ、採取した唾液を得ます。

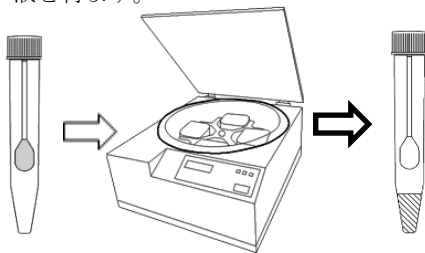

④

遠心分離後、綿棒は折る事が出来ます。

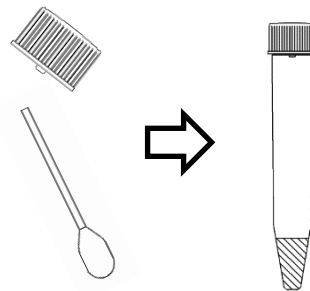

【使用上の注意】

1. 本品は唾液を採取するための医科用捲綿子です。その他の用途に使用しないでください。
2. 汚れ、破損、折れ等があった場合には使用を中止してください。
3. 使用後は速やかに滅菌処理等を行ってから廃棄してください。

【保管方法及び有効期間等】

- ・保管方法：未使用時 室温保存
- ・有効期間：未使用時 3 年
- ・放射線照射済

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：
有限会社佐藤化成工業所
栃木県日光市岩崎 1471
TEL 0288-27-0184 FAX 0288-27-0253