

機械器具 54 医療用捲綿子
一般医療機器 医科用捲綿子 10172000

エム・アイ・採便管W

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止【単回使用のため】
- 自己採取の使用禁止【医科用のため】

【形状・構造及び原理等】

1・構成


ポリプロピレン（P P）製の白色の試験管に、エラストマパッキンを付けたポリエチレン（P E）製の白いキャップとポリプロピレン（P P）製の採便棒をセットし、放射線照射処理をした容器です。
採便棒には検体（便）を採取するための窪みがつけられている。

2・原理

容器のキャップ（採便棒付）を外し、採便棒を直接肛門に挿入して1～2回まわす。そうすることで、採便棒の窪みに検体（便）が掻き取られる。

3・皮膚に接触する部分の組成

採便棒：ポリプロピレン（P P）

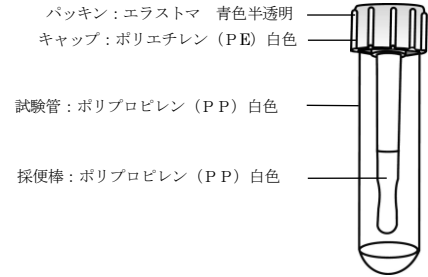

【使用目的】


検査のための検体（便）を採取するための医科用捲綿子（採便棒）です。

【使用方法等】

- ① 容器のキャップ（採便棒付）を外す。



- ② 採便棒を直接肛門に挿入して1～2回まわし、検体（便）を採取する。

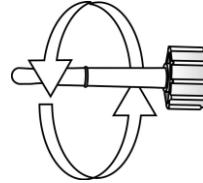

※実際の製品は、管が白色のため、中の採便棒は見えません。

【使用上の注意】

- 1・本品は、検体（便）を採取するための医科用捲綿子（採便棒）です。他の用途には使用しないでください。
- 2・採便棒の先を肛門内に強く挿入しないでください。
- 3・包装が破損・汚損している場合は使用しないでください。
- 4・有効期間を過ぎた製品は、使用しないでください。

【品目仕様】

- | | |
|-------|--|
| ・パッキン | ： 外径 16.2mm（±0.2mm）・内径 13.5mm（±0.2mm）・厚さ 1.5mm（±0.2mm）・青色半透明 |
| ・試験管 | ： 外径 15.5mm（±0.2mm）・管長 75.5mm（±1.0mm）・白色 |
| ・キャップ | ： 外径 20.5mm（±0.2mm）・長さ 12.3mm（±0.2mm）・白色 |
| ・採便棒 | ： 長さ 55.5mm（±1.0mm）・軸部径 6.2mm（±0.2mm）・ツバ長さ 2.0mm・ツバ径 9.0mm・接続長さ 10.0mm（±1.0mm）・接続部径 5.0mm（±0.2mm）・全長 67.5mm（±1.0mm）・白色 |

【保管方法及び有効期間】

保管方法：室温保存

有効期間：2 年

放射線照射済

【包装】

1 箱 100 本入り（20 本入り袋×5）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

有限会社佐藤化成工業所

栃木県日光市岩崎 1 4 7 1

TEL0288-27-0184