

## メディラインすらっと着圧ソックス

### 【禁忌・禁止】

- ・重度の血行障害、うっ血栓心不全及び有痛性青股腫の方は使用しないでください。
- ・化膿性静脈炎の方は使用しないでください。
- ・使用素材に対する過敏症がある方は使用しないでください。
- ・下肢に知覚障害がある方は使用しないでください。
- ・ご自身で脱着できない方は使用しないでください。
- ・軟膏等の薬品や油脂類との併用はお止めください。

### 【形状・構造及び原理等】

#### ■形状



#### ■構造

- ・着圧力: 足首:(約)25hPa  
ふくらはぎ:(約)18hPa

#### ■原理

- ・弾性ストッキングによって「足首」から「ふくらはぎ」に向かい漸減的に圧迫を加えることにより、静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減又は予防する。

### 【使用目的又は効果】

装着部(下肢)の血行促進及び、むくみの軽減と予防。

### 【使用方法等】

- ・適用サイズの範囲内であることをご確認ください。
- ・当商品は足首周りの圧迫力が一番強くなりますので、普通の靴下などを履くようにたくし上げると足が通りにくくなります。通常の状態ですて足を通してください。

### 【使用上の注意】

- ・治療用としてお使いの場合は、医師の指示により適切な弾性ストッキングをご使用ください。
- ・糖尿病、高血圧などの症状がある方は医師にご相談ください。
- ・体に疾患等がある方は医師にご相談ください。
- ・動脈血循環に障害のある方は着用をお控えください。
- ・皮膚炎、経皮的感染、血栓の存在予見がある方は着用をお控えください。
- ・湯温の高いお風呂への入浴は避けてください。
- ・着圧の高いソックス、ストッキング、スパッツ等、圧迫感のあるものを重ねての着用はお控えください。
- ・しわ、折れないように着用してください。
- ・長時間着用する場合は適度な脱着を繰り返してください。
- ・着用中、痛みを伴う締め付け感や体の異常を感じられた時は即座に使用をおやめください。
- ・「[ほつれ]の原因になりますので、爪や鋭利なもので引っ掛けないでください。
- ・破れやほつれ、緩みがある物は所定の性能を発揮できません。
- ・就寝時の着用はお控えください。
- ・着用時に足先の痺れや変色などが現れた場合は着用を中止してください。
- ・着用時に摩擦(特に雨や汗により湿った状態での摩擦)で他に色が移る場合がありますのでご注意ください。

### 【保管方法及び有効期間等】

- ・室温で保管してください。
- ・直射日光や高温多湿を避けて保管してください。

### 【保守・点検】

- ・着用前に破れやほつれが無いことを確認してください。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

株式会社 サンメディカル  
千葉県野田市目吹96番地 電話04-7123-8515

表面の使用上の注意を必ずご参照ください。