

機械器具 12 理学療法用器具

一般医療機器 弾性ストッキング (JMDNコード: 31724000)

一般医療用メディカルめぐりサポーター

【禁忌・禁止】

- ・重度の血行障害、うっ血性心不全及び有痛性青股腫の方は使用しないでください。
- ・化膿性静脈炎の方は使用しないでください。
- ・使用素材に対する過敏症がある方は使用しないでください。
- ・下肢に知覚障害がある方は使用しないでください。
- ・ご自身で脱着できない方は使用しないでください。
- ・軟膏等の薬品や油脂類との併用はお止めください。

【形状・構造及び原理等】

■形状



■構造

着圧力: 足部 25hPa、足首: 23hPa

ふくらはぎ: 18hPa

(装着躯体: マネキン 7 号)

■原理

- ・弾性ストッキングによって「足首」から「ふくらはぎ」に向かい漸減的に圧迫を加えることにより、静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減又は予防する。

【使用目的又は効果】

- ・四肢の静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減又は予防する等、静脈還流の促進を目的とする。

【使用方法等】

- ・適用サイズの範囲内であることをご確認ください。
- ・当商品は足部周りの圧迫力が一番強くなりますので、普通の靴下などを履くようにたくし上げると足が通りにくくなります。通常の状態ですて足を通してください。

【使用上の注意】

- ・治療用としてお使いの場合は、医師の指示により、適切な弾性ストッキングをご使用ください。
- ・糖尿病、高血圧などの症状がある方は医師にご相談ください。
- ・体に疾患等がある方は医師にご相談ください。
- ・動脈血循環に障害のある方は着用をお控えください。
- ・皮膚炎、経皮的感染、血栓の存在予見がある方は着用をお控えください。
- ・湯温の高いお風呂への入浴は避けてください。
- ・着圧の高いソックス、ストッキング、スパッツ等、圧迫感のあるものを重ねての着用はお控えください。
- ・しわ、折れないように着用してください。
- ・長時間着用する場合は適度な脱着を繰り返してください。
- ・適応サイズの範囲外の方は着用しないでください。
- ・着用中、痛みを伴う締め付け感や体の異常を感じられた時は即座に使用をおやめください。
- ・「ほつれ」の原因になりますので、爪や鋭利なもので引っ掛けないでください。
- ・破れやほつれ、緩みがある物は所定の性能を発揮できません。
- ・就寝時の着用はお控えください。
- ・着用時に足先の痺れや変色などが現れた場合は着用を中止してください。

【保管方法及び有効期間等】

- ・室温で保管してください。
- ・直射日光や高温多湿を避けて保管してください。

【保守・点検】

- ・着用前に破れやほつれが無いことを確認してください。

【発売元】

株式会社サンスマイル

愛知県名古屋市中区砂原町 123 番地

電話: 052-825-6633

【製造販売元の氏名又は名称及び住所等】

株式会社サンメディカル

千葉県野田市目吹 9 6 番地

電話: 04-7123-8515

表面の取扱い方法・使用方法を必ずご参照ください。