

許可番号：07B3X10001

品目番号：07B3X10001000045

2017/08/01 作成(第2版)(新記載要領に基づく改訂)

2008/11/05 作成(新様式第1版)

医4 整形用品
一般医療機器 医療脱脂綿

カット綿 8×17

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止。
- 体内に留置しないこと。

【形状・構造及び原理等】

綿100%の脱脂綿。本品は白色の繊維状の軟毛で、臭い及び味は無い。
セルロースの親水性及び中空構造により吸収性を有し、液体の吸収を行う。

【使用目的又は効果】

衛生材料。医薬品を塗布したり、液体を吸収したりする医療目的に使用する綿繊維。
アルコールを含ませて酒精綿としても使用する。

【使用方法等】

衛生材料として適宜使用すること。創傷面には滅菌して使用すること。

【使用上の注意】

再使用しないこと。直接患部に使用するときには、繊維が患部に残らないように注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。

【包装】

パッケージに内容物の重量を記載。 単位:グラム (g)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 サンメディカル郡山工場
〒963-0724 福島県郡山市田村町上行合字西川原 47 番地の 1
お問い合わせ電話番号 0120-082-159

製造業者 株式会社 サンメディカル郡山工場

MADO IN CHINA