

添付文書

**2017 年 8 月（第 3 版）

届出番号 26B2X00004000021

*2016 年 12 月（第 2 版）

機械器具 21 内臓機能検査用器具
一般医療機器 心電計ケーブル及びリード JMDN 35562010

販売名 心電オキシアダプタ CM-001

【禁忌・禁止】

- ・本品は絶対に改造しないこと。


「重大な事故（感電、誤った生体信号の出力等）の原因となるため」

併用医療機器

- ・磁気共鳴画像診断装置(MRI) 環境下では使用しないこと。
「誘導起電力による局所的な発熱で患者が熱傷を負う恐れがあるため」

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造
 - (1) 中継部
 - (2) コネクタ部
2. 外観

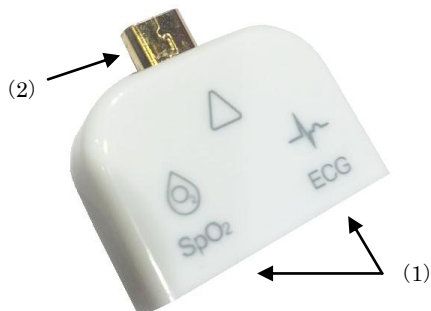

【使用目的又は効果】

本製品は、被検者の心電図信号、SpO2（酸素飽和度）信号を心電計（ECG）に伝達する中継アダプタである。

【使用方法等】

本品を使用する前に、使用する「ヘルスモニター Checkme Pro」または「ヘルスモニター Checkme Lite」の取扱説明書を熟読し、理解した上で使用すること。

- (1) 「ヘルスモニター Checkme Pro」または「ヘルスモニター Checkme Lite」に本品を取り付けるには、コネクタ位置を確認し、しっかりと確実に接続してください。
- (2) 本品の中継部と誘導コード及びパルスオキシメータプローブのコネクタ部をしっかりと確実に接続してください。
- (3) 誘導コード及びパルスオキシメータプローブを本品から取り外すには、コネクタ部分の結合器の固い部分をしっかりと持って抜いてください。

**【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ・医家向け医療機器であるため、医師による使用及び医師の指示によって使用してください。
- ・抜き差しを行う場合は、リード線を引っ張らずにリード線のコネクタ部と中継部を持って行ってください。
「リード線の断線や接触不良の原因となります。」
- ・指定の装置以外への接続は、行わないで下さい。
- ・本品の上にものを置いたり、踏まれたりしないようにしてください。
- ・正確な波形や信号を得るために、誘導コード及びパルスオキシメータプローブとの接続は機器の取扱説明書に従い、正しく接続してください。
- ・測定中にモバイル端末にデータを転送する場合は、モバイル端末を患者環境外に設置してください。

【保管方法及び有効期間等】

<耐用期間>

- ・使用開始より 1 年「自己認証（当社データによる）」

【保守・点検に係る事項】

- ・本品使用後は中性洗剤または 70%イソプロピルアルコールで清拭してください。コネクタ等からケーブルを引っ張るように清拭しないでください。（ケーブルを清掃する際はコネクタ部を持たずにケーブル部を握って清掃願います）[ケーブル被覆の劣化を促進し、破損の恐れがあります。特に有機溶剤やクレゾール石けん等の消毒液はケーブル被覆の劣化を促進します。]
- ・清拭後は乾燥していることを確認してご使用ください。
- ・蒸気、EOG 等の高温滅菌はおこなわないでください。

使用者による保守点検事項

- (1) 本製品を使用する前に、破損、劣化、異常等が無いを目視点検を行ってください。
- (2) 全てのケーブルやコネクタが安全にセットされているかチェックしてください。
- (3) 本製品使用後は、清潔に保管してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 三栄メディシス株式会社
TEL 075-502-0066
外国製造業者 シンセン ビアトム テクノロジー
Shenzhen Viatom Technology Co., Ltd.
国名 中華人民共和国