

2021年 4月改訂 (第2版)(新記載要領に基づく改訂)
2011年 3月作成 (第1版)

製造販売届出番号：18B3X10004000003

器具器械 66 歯科用練成器
一般医療機器 歯科用練成器具 JMDNコード：70682000


インナートレー

【形状・構造及び原理等】

〈形状・構造〉



品番	色	寸法
IT-1S06	グリーン	90 x 24 x 5 mm

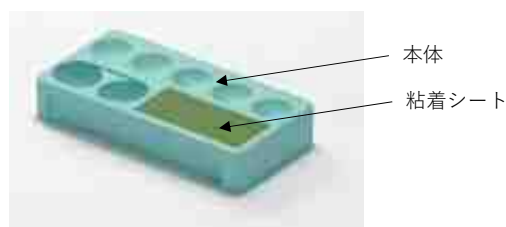

品番	色	寸法
IT-2S02	グリーン	77 x 40 x 14 mm

【使用目的または効果】

各種セメント等を練和するために用いる。

【使用方法等】

本品の球形状窪みの部分に歯科材料（印象材料、セメントなど）を取り出し練和する。

【使用上の注意】

〈その他の注意〉

1. シリコーン系の印象材は融着するので使用しないこと。
2. 鋭利なスパチュラは使用しないこと。
3. 薬品を入れたまま、長時間放置しないこと。
4. 本品は歯科医療有資格者以外使用しないこと。
5. 粘着シートは使用前に両面のフィルムをはがして使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

〈保管の条件〉

高温多湿を避け冷暗所等にて保管すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者及び製造業者：サカセ化学工業株式会社
電話：0776-56-1122