

類別: 機械器具 12 理学診療用器具
一般医療機器 一般的名称: 弾性ストッキング JMDN31724000

ギロファ・アロエベラソックス

【警告】

次の症状があらわれることがありますので、これらの症状があらわれた場合、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。

血行障害 (チアノーゼ、腫脹、疼痛、しびれ、皮膚の冷感等)
神経障害 (腓骨 神経麻痺など)、皮膚障害 (本品のずれ、圧迫等による皮膚潰瘍)、その他本品の着用時や着脱後、装着部位に発赤、水疱、かゆみ、発疹、かぶれなどの皮膚障害があらわれた場合。


【禁忌・禁止】

次の方は使用しないでください。

1. 血圧の高い方、心臓・肝臓に障害のある方。
2. 現在、かゆみや発疹をおこしている方。
3. 血行障害を起こしたことがある方。
4. 装着部位に極度の変形を有する方。

【形状・構造及び原理等】

〔形状・構造〕

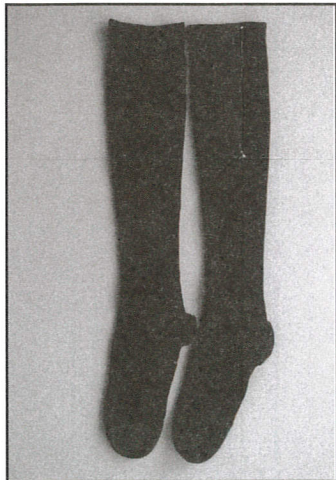

1. 本品は、ナイロン (マイクロファイバー)、ナイロン、綿、ポリウレタンにより構成される。
2. 弾性圧力 : 18mmHg (24hPa) 足首
3. サイズ : S (足のサイズ: 22 ~ 23.5cm)
: M (足のサイズ: 24 ~ 25.5cm)
: L (足のサイズ: 26 ~ 27cm)

〔原理〕

末梢から中枢に向かい漸減的に静脈に圧迫を加えることで、四肢の静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減・予防し、静脈還流を促進する。

*【使用目的又は効果】

1. 四肢の静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減・予防する。
2. 静脈還流を促進する。

*【使用方法等】

1. 繊維を傷めない為、履く前に、指輪、ブレスレット、時計はとるようにしてください。
2. 座って履くことをおすすめします。靴下を丸めてつま先までたぐりよせて、つま先部分を正確に入れます。

3. 足首のところまで引き上げ、かかとの切り替え部分が 90° になるように、かかとの位置を正確に合わせます。
4. 両手の親指を内側に入れて、半円を描くように均等に引き上げていきます。
5. 上まで引っ張り、引き上げたら、しわを伸ばしてください。

【使用上の注意】

1. 次の方は着用前に医師にご相談ください。
 - ① 深部静脈血栓の方。
 - ② 動脈血行障害、うっ血性心不全、及び装着部位に炎症性疾患、化膿性疾患、創傷のある方。
 - ③ 装着部位に神経障害のある方。
 - ④ 糖尿病の方。
 - ⑤ 繊維に対して過敏症のある方。
2. 着用にあたり、次のことに注意してください。
 - ① 正しい圧迫圧を得るために、正しいサイズを選択してください。
 - ② サイズの合わないものや、2 枚重ねて使用することは避けてください。
 - ③ 使用中にしわやたるみができないようにしてください。
 - ④ 折り返して使用することは避けてください。
 - ⑤ 破損 (伝線、ほつれ、破れ等) がないことを確認してから着用してください。破損がある場合は適切な圧迫が得られないため着用しないでください。
 - ⑥ 就寝時の着用は避けてください。
3. サポート力が強い為、着脱後足首に多少あとが残りますが、あとは自然に消えます。

*【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

室温下で、水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管してください。

【保守・点検に係る事項】

洗濯の際には下記の事項に注意してください。

- ① ぬるま湯に中性洗剤を溶かし、手洗いしてください。
- ② 塩素系漂白剤は絶対に使用しないでください。
- ③ 他の色物とは分離して洗ってください。
- ④ タオル等で水分をとり、直射日光は避け、風通しのよい場所で陰干ししてください。
- ⑤ 脱水機・乾燥機・アイロン・電子レンジなどでの強制乾燥は生地伸びを無くしますので絶対に使用しないでください。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 : 株式会社 三信商会
電話番号 : 045-929-5433

製造業者 : Ofa Bamberg GmbH (ドイツ)