

2023年2月15日作成（第一版）

取扱説明書

製造販売届出番号:11B3X10017000024

器械器具12 理学診療用器具 一般医療機器 弾性ストッキング 31724000

下肢静脈サポーター脚ツカレンジャー

ご使用前に必ずお読み下さい。

【禁忌・禁止】

1.以下に該当する方は使用しないで下さい

- 深部静脈血栓症の方。（肺血栓塞栓症を発症するおそれがあるため）
- 動脈血行障害、うっ血性心不全及び有痛性青股腫、装着部位に炎症性疾患、化膿性疾患、創傷のある方。（圧迫により症状が悪化するおそれがあるため）
- 化膿性静脈炎の方。（菌血症や敗血症を発症、増悪させるおそれがあるため）
- 装着部位に神経障害のある方。（血行障害を起こしても認識できないおそれがあるため）
- 糖尿病の方。（無症状の神経障害や血行障害を併発している可能性があり、痛み等の異常を認識できないおそれがあるため）
- 装着部位に極度の変形を有する方（適切な圧迫圧が得られないおそれがあるため）
- 繊維に対して過敏症のある方。（接触性皮膚炎を起こすおそれがあるため）

2.ご使用にあたって

- ふくらはぎや足首など下肢の症状で通院中の方は、ご使用前にかかりつけの医師に相談し、医師の指示に従ってご使用下さい。

【形状・構造及び原理等】

形状：

サイズと右左の表記

土踏まずパッド

(つま先側)

(かかと側)

構造：圧迫圧／(足首部):約27hPa (ふくらはぎ部):約22hPa

※足首周り20.5cm、ふくらはぎ周り34.5cmのマネキンで測定した数値。

原理：本品の形状と伸縮特性により、足首からふくらはぎにかけて漸減的な圧迫を加える。

素材：(生地):ナイロン、ポリウレタン (パッド):ポリエチレンフォーム

使用目的又は効果

下肢の静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減又は予防し、静脈還流を促進、むくみを軽減する。

【製造販売業者の氏名又は名称及び住所等】

【製造販売業者】株式会社サクサン

埼玉県川越市砂新田80-38

TEL:049-246-1232

【使用方法】


①はじめに、右足用か左足用か履き口の表記をご確認下さい。



②本品をたぐりよせて、つま先を入れます。



③足首まで引き上げ、かかとの位置を合わせます。

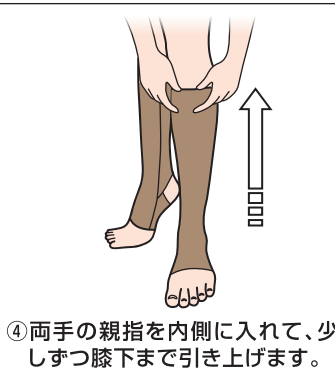

④両手の親指を内側に入れて、少しずつ膝下まで引き上げます。



⑤パッドが土踏まずに当たるよう位置を調節して下さい。パッドが大きすぎる場合は、本品を着用する前に位置や向きを調節して下さい。

⑥最後に、本品にシワや捻じれが無いよう整えて下さい。

【使用上の注意】

- 初めのうちは1～2時間程度の短い時間でご使用いただき、痛みやかゆみ等の異常が無いか確認して、徐々に使用時間を長くして下さい。
- 使用中、または使用後に痛みやかゆみ等の異常を感じた場合は直ちに使用を中止し、専門医にご相談下さい。
- 適応サイズ範囲外の方は使用しないで下さい。
- 着圧が強く圧迫感のあるソックス、ストッキング、スパッツ等との併用は避け下さい。
- 長時間使用する場合は、適度な着脱を繰り返して下さい。
- 爪や鋭利なもので本品を傷つけないようご注意下さい。
- 軟膏等の薬品や油脂類との併用は避け下さい。
- 就寝中は使用しないで下さい。
- 本来の目的以外では使用しないで下さい。
- 汚れた場合は手洗いをして下さい。漂白剤は使用しないで下さい。乾燥機のご使用は避け下さい。直射日光には当てず必ず陰干しをして下さい。長時間水に浸さないで下さい。

【保管方法及び有効期間等】

- 直射日光や高温多湿を避け、乳幼児の手の届かない場所に保管して下さい。

【保守・点検に係る事項】

- 着用前に破れやほつれが無いか確認して下さい。

【商品についてのお問い合わせ先】

株式会社オリジナルオファー

愛知県清須市春日須ヶ田85

TEL:052-408-2131 (平日10:00～17:00 土日祝休み)