

使用に際しては、取扱説明書を必ず参照すること

2026 年 8 月（第 4 版）

届出番号：39B2X10004000054

類別：歯科材料 08 歯科用石こう及び石こう製品

一般医療機器 歯科用樹脂系模型材（JMDN コード：34811000）

## 販売名：光硬化性樹脂材料 SP-Model-EY

### 【形状・構造及び原理等】

- 主成分：アクリレート系モノマー類・化合物
- 形状：液体
- 原理：特定波長の紫外線照射により重合硬化する。
- 色調

| 呼 称              | 色 調     |
|------------------|---------|
| SP-Model-EY      | フレッシュ   |
| SP-Model-EY (LW) | ライムホワイト |

### 【使用目的又は効果】

- 使用目的  
歯科技工物を作製するための各種間接法インレー、クラウン、ブリッジ、局部義歯、総義歯及び矯正用模型材等に用いる。
- 効果  
歯科用模型の作製ができる。

### 【使用方法等】

詳細については取扱説明書を必ず参照してください。

- 使用方法
  - 本材を容器のまま攪拌機等で攪拌し、内容成分を十分に混合させます。本材が 23℃未満の場合は、容器を湯煎等で温めてください（23～28℃推奨）。
  - 本材を 3D プリンタのレジンパットに移した後、3D プリンタにセットします。
  - 3D プリンタの当該添付文書及び取扱説明書に従って作製物の造形データを読み込ませ、造形を開始します。
  - 造形が完了後、3D プリンタより造形物を取り出し、造形物の洗浄・乾燥、必要に応じて二次重合を行います。
  - 造形物のサポート材を取り除き、状態に応じて形状修正を行います。
  - 造形作業終了後、長時間造形を行わない場合は、レジンパットより容器に戻して保管してください。

### 【使用上の注意】

- 使用目的以外で使用しないこと。
- 十分な操作知識をもったうえで使用すること。
- 本品を取り扱う際は、ニトリルゴム手袋や保護メガネを着用し、皮膚への付着や目への混入を予防すること。又、誤飲等に十分注意すること。
- アレルギー性皮膚疾患、喘息や慢性呼吸器系疾患を患っている方は、本品の取り扱いをしないこと。
- 本品が皮膚等に付着した場合は、速やかに水で洗い流すこと。
- 本品が目に入った場合は、速やかに多量の流水で洗浄の後、眼科医の診断を受けること。

### 【保管方法及び有効期間等】

- 保管方法
  - 温度は 20～28℃、湿度は 10～80 %、氷結・結露のない、自然光や紫外線を含む光が当たらない、換気の良い環境で保管すること。
  - 水などの液体がかからない環境で保管すること。
  - 多量の塩分やイオウ分を含んだ環境、化学薬品の保管場所、及び腐食性ガスの発生する環境では保管しないこと。
- 有効期間  
製造日より 24 か月間。（適切な環境下での保管の場合）

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

#### 製造販売業者

有限会社サット・システムズ  
電話番号：088-802-8175

#### 製造業者

シェンゼン イディム インテリジェント テクノロジー カンパニーリミテッド  
Shenzhen Yidimu Intelligent technology Co., Ltd.  
国 名：中華人民共和国

有限会社サット・システムズ