

使用に際しては、取扱説明書を必ず参照すること

2023 年 9 月（第 1 版）

届出番号：39B2X10004000069

類別：歯科材料 08 歯科用石こう及び石こう製品
一般医療機器 歯科用樹脂系模型材（JMDN コード：34811000）

販売名：光硬化性樹脂材料 SP-Model-WW

【形状・構造及び原理等】

- 主成分：アクリレート系モノマー類・化合物
- 形状：液体
- 原理：特定波長の紫外線照射により重合硬化する。

【使用目的又は効果】

- 使用目的
歯科技工物を作製するための各種間接法インレー、クラウン、ブリッジ、局部義歯、総義歯及び矯正用模型材等に用いる。
- 効果
歯科用模型の作製ができる。

【使用方法等】

詳細については取扱説明書を必ず参照してください。

- 使用方法
 - ① 本材を容器のまま攪拌機等で攪拌し、内容成分を十分に混合させます。本材が 23℃未満の場合は、容器を湯煎等で温めてください（23～28℃推奨）。
 - ② 本材を 3D プリンタのレジンバットに移した後、3D プリンタにセットします。
 - ③ 3D プリンタの当該添付文書及び取扱説明書に従って作製物の造形データを読み込ませ、造形を開始します。
 - ④ 造形が完了後、3D プリンタより造形物を取り出し、造形物の洗浄（アルコール系洗浄液又は水）・乾燥、必要に応じて二次重合を行います。
 - ⑤ 造形物のサポート材を取り除き、状態に応じて形状修正を行います。
 - ⑥ 造形作業終了後、長時間造形を行わない場合は、レジンバットより容器に戻して保管してください。

【使用上の注意】

- 使用目的以外で使用しないこと。
- 十分な操作知識をもったうえで使用すること。
- 本品を取り扱う際は、ニトリルゴム手袋や保護メガネを着用し、皮膚への付着や目への混入を予防すること。又、誤飲等に十分注意すること。
- アレルギー性皮膚疾患、喘息や慢性呼吸器系疾患を患っている方は、本品の取り扱いをしないこと。
- 本品が皮膚等に付着した場合は、速やかに水で洗浄し流すこと。
- 本品が目に入った場合は、速やかに多量の流水で洗浄の後、眼科医の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

- 保管方法
 - ・ 温度は 20～28℃、湿度は 10～80 %、氷結・結露のない、自然光や紫外線を含む光が当たらない、換気の良い環境で保管すること。
 - ・ 水などの液体がかからない環境で保管すること。
 - ・ 多量の塩分やイオウ分を含んだ環境、化学薬品の保管場所、及び腐食性ガスの発生する環境では保管しないこと。
- 有効期間
製造日より 24 か月間。（適切な環境下での保管の場合）

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売者
有限会社サット・システムズ
電話番号：088-802-8175

製造業者
チェイチャンウェイビンスリーディーテクノロジー
カンパニーリミテッド
ZheJiang Weibin 3D Technology Co., Ltd.
国名：中華人民共和国
有限会社サット・システムズ