

類別：歯科材料 07 歯科用ワックス

一般医療機器 歯科用キャスティングワックス（JMDN コード：16189000）

販売名：CAD/CAM 用ワックス

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

主成分：ポリエチレンワックス

形状：



本体寸法：円型 φ98.5mm (厚 14mm/20mm/25mm)
円型(特殊) φ98.5mm (厚 13mm/20mm)
ブロック型 76mm×40mm×20mm

2. 原理

CAD / CAM 加工機等で本材を切削加工し、ロストワックス法による歯科補綴物鑄造作業のロウ型として使用する。

【使用目的又は効果】

1. 使用目的

歯科用補綴修復物（インレー、クラウン、ブリッジ）のロウ型の材料に用いる。

2. 効果

ロストワックス法による歯科用補綴修復物作製の為のロウ型が作製できる。

【使用方法等】

1. 使用環境条件

使用場所 ：室内
温度/湿度 ：18～30℃ / 60%以下

2. 使用方法

- ① CAD/CAM 加工機にて切削加工しロウ型を作製する
- ② 切削加工後、必要に応じてマージンの調整を行う
- ③ ロウ型を用いて歯科用補綴物の鑄造作業を行う

【使用上の注意】

- ・ 本材は可燃性の為、取扱いに十分注意すること。
- ・ 再溶解して使用しないこと。
- ・ 過度の加熱を避け、加熱したまま放置しないこと。
- ・ 使用目的以外で使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- ・ 直火、高温面、発火源、直射日光を避け、涼しく乾燥した場所に保管すること。
- ・ 一箇所の保管場所での多量の保管は避けること。
- ・ 保管場所は火気厳禁とし、適切な消火設備を備えること。

2. 有効期間

適切な環境での保管の場合、有効期間は 5 年とする。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

有限会社サット・システムズ
電話番号：088-821-8700

製造業者

アイダイテ(チンホワンタオ)テクノロジー カンパニーリミテッド
Aidite(Qinhuangdao)Technology Co.,Ltd.
国 名 ： 中華人民共和国

有限会社サット・システムズ