

機械器具 36 医療用ピンセット
一般医療機器 ピンセット JMDN コード : 35079001

ストッパー付きピンセット

【警告】

1. 本品は全て未滅菌で供給されますので、初めて使用する際、及び使用前に必ず洗浄と滅菌を行ってください（【保守・点検に係る事項】欄参照）。
2. 曲げる、削る等の加工を行わないでください。（破損等の原因となります。）
3. 使用する洗浄液、消毒液、及び洗浄消毒装置は、各メーカーの添付文書及び取扱説明書に従って使用してください。

【形状・構造及び原理】

1. 形状

代表的写真



2. 材質

ステンレス鋼

3. 原理

手指による加圧操作により把持部を閉じて対象物を挟むとストッパーが自動的にかかり、それ以降は手指による加圧なしでも対象物を把持し続ける。

ストッパーを先端方向に軽く押すことにより把持状態を解除することができる。

【使用目的又は効果】

本品は、診療、処置、消毒又は手術等の際に皮膚、組織、異物、消毒綿等の対象物を把持するために用いる器具である。

【使用方法等】

- 1) 本品は再使用可能な機器であり、未滅菌品なので、使用前には必ず洗浄・滅菌を行ってください。
- 2) 対象物及び目的に応じて把持部を閉じ、ストッパーを効かせてください。把持部を開くときにはストッパーをピンセットの先端部方向に軽く押して解除してください。
- 3) 使用後は適切な方法により洗浄を行い、保管してください。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 本品は、使用する前に滅菌する必要があります。本品を購入後初めて使用する場合も、洗浄及び滅菌を実施して下さい（【保守・点検に係る事項】欄参照）。
- 2) 本品を使用する前に、傷や変形、損傷がないことを必ず確認して下さい。
- 3) 本品使用後は速やかに洗浄等を行って下さい（【保守・点検に係る事項】欄参照）。
速やかに洗浄することが困難な場合は、組織片などの汚れが乾燥して固着するのを防ぐために、機器を適切な洗浄液に浸漬してください。
汚れがひどい場合は、布等で取り除いてください。
- **4) プリオン病の感染症疑いの有無にかかわらず、本品がハイリスク手技に使用された場合には、「プリオン病感染予防ガイドライン」に従った洗浄、滅菌を実施する。
- **5) 本品がプリオン病の感染症患者への使用及びその汚染が疑われる場合には、製造販売業者又は貸与業者に連絡すること。
- 6) ステンレス鋼は錆びを生じにくい金属ですが、洗浄・保管等が不適切な場合は錆びを生じます。
- 7) 過剰な応力がかかると本品の折れの原因となります。

2. その他の注意

- 1) 本品を購入後、はじめて滅菌する場合は、予め洗浄処理を実施した後に滅菌してください。
- 2) 本品を使用目的以外の目的で使用しないでください。
- 3) 過度の力を加えたり、無理な使用はしないでください。
(器具の損傷の原因になります。)

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 清潔で、良好な乾燥状態を確保できる場所で保管してください。
- 2) 滅菌した状態で保管する場合、滅菌有効期限を管理してください。

【保守・点検に係る事項】

1. 洗浄

- 1) 汚れが乾燥し、落ちにくくなるのを防ぐため、付着した血液・体液・組織・薬品等は直ちに洗浄し、消毒してください。
- * 2) 汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、その適正濃度と取扱方法を守ってください。
- 3) 超音波洗浄装置・ウォッシャーディスインフェクター等の洗浄装置で洗浄する場合、汚れが落ちやすい状態でバスケット等に収納して処理してください。
- 4) 金属タワシ、クレンザー(磨き粉)等は、器具表面を損傷するので使用を避けてください。
- 5) 仕上げすぎには、精製水・脱イオン水・濾過水等の使用を推奨します。
- 6) 洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥してください。

2. 消毒・滅菌

本品を滅菌する場合は、日本薬局方参考情報 11 微生物殺滅法 2. 滅菌法 2-1 加熱法に示される下記の条件下での滅菌を推奨します。また、滅菌器に関する詳細は滅菌器の取扱説明書に従ってください。

滅菌条件：

- 条件 (1) 温度 115～118℃ 時間 30 分以上
- 条件 (2) 温度 121～124℃ 時間 15 分以上
- 条件 (3) 温度 126～129℃ 時間 10 分以上

3. 点検

使用前に汚れ、傷や亀裂、曲がり、先端部の損傷、ストッパーの異常等がないことを確認してください。
異常が発見された場合は使用を中止してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 佐伯製作所

〒607-8301

* 京都府京都市山科区西野山百々町 254-1

TEL：075-591-9425

国内製造業者：株式会社 佐伯製作所

〒607-8301

* 京都府京都市山科区西野山百々町 254-1

TEL：075-591-9425