

医療用品 03 手術用手袋及び指サック

一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋（JMDN コード：70976000）

エンゼル ニトリルグローブソフト

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本製品はアクリロニトリルブタジエンゴムを主原料とする、検査・検診用の使い捨て手袋である。
左右兼用であり、パウダーなしの未滅菌である。

サイズ	XS	S	M	L	XL
全長[mm] 最小値	230	230	230	230	230
掌幅[mm] ±5mm	70	80	95	110	120

【使用目的又は効果】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から守るために使用する手袋です。

【使用方法等】

小箱のミシン目を丁寧に切り取り、開封部より手袋を取り出し、本製品を傷つけないように丁寧に装着する。

【使用上の注意】

1.使用注意

- 体質によってはかゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがありますので、異常を感じましたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
- 包装や製品に破損・汚損・ピンホール等の異常が認められた場合には使用しないで下さい。
- 着色ムラがある場合でも、品質上の問題はございません。
- 本製品は使い捨て手袋です。繰り返しの使用はしないで下さい。

2.重要な基本的注意

- 刃物等の鋭利な器具に触れると破れたり、穴があくことがありますので注意して下さい。
- 薬品、溶剤等によっては膨潤・浸透のおそれがあるため、確認の上、注意して使用して下さい。

【保管方法及び有効期間等】

1.貯蔵・保管方法

- 水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け保管して下さい。
- 包装開封後は、直射日光や蛍光灯下を避け、エックス線機器等の周辺に保管しないで下さい。

2.有効期間

製造年月より 5 年（自己認証による）
有効期間は内箱に記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

サンフラワー株式会社

〒101-0032 東京都千代田区岩本町 2-8-9

お問合せ先 TEL 03-5833-8781