

一般医療機器 歯科材料 8 歯科用石膏及び石膏製品
歯科用硬質石こう JMDN70897020

ニューティーストーン

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

形状: 粉末

成分: 石こう、硬化時間調整剤、着色剤、膨張調整剤

色調: イエロー、ホワイト、ブルー、ピンク、グリーン、グレー

原理: 水と練和することにより水和反応を生じ、一定時間後に硬化する。

*仕様:

混水量 (%)	24
硬化時間 (分)	10
線硬化膨張 (%)	0.20
圧縮強さ (MPa)	50

該当規格: JIS T 6600「歯科用石こう」タイプ 3

【保管方法及び有効期間等】

[貯蔵・保管方法]

- (1) 高温、多湿の場所を避けて保管すること。
- (2) 開封したまま放置すると吸湿し変質する恐れがあるので、開封後は直ちに十分に密封するか、密封できる容器に移すこと。
- (3) 荷崩れする恐れがあるので高く積層しないこと。

[有効期間、使用期限]

包装に記載の使用期限まで (開封後は対象外)

[記載の使用期限は自己認証 (当社データ) による]。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 サンケイ吉野株式会社

住所 〒507-0825 岐阜県多治見市京町 2 丁目 108 番地

電話番号 0572-22-4301

【使用目的又は効果】

歯科技工物を作製するために模型材等に用いる。

【使用方法等】

[使用方法]

- (1) 混水量は粉末 100g に対して水 24ml が標準ですが、水の量は操作性に支障のない範囲で、用途に応じて調整して下さい。
- (2) 練和時間は 60 秒前後、むらなく均一に練和して下さい。
- (3) 印象等からの脱型は約 1 時間後が適切です。

【使用上の注意】

[使用注意]

- (1) 本製品を使用する際 (硬化体を研削する場合も含む) には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置や公的機関が認可した防塵マスク等を使用して、粉塵を吸入しないこと。
- (2) 硬化体を研削する際には目の損傷を防ぐため、保護めがね等の防具を使用すること。

[重要な基本的注意]

- (1) 本製品の使用により、発疹、皮膚炎などの過敏症状があらわれた場合には、使用を中止し、医師の診断を受けること。
- (2) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。