

機械器具 医療用鏡  
一般医療機器 内視鏡用部品アダプタ JMDNコード：37090010

# L43Kプローブ専用アタッチメント


## 再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

### 【形状・構造及び原理等】

- ・形状

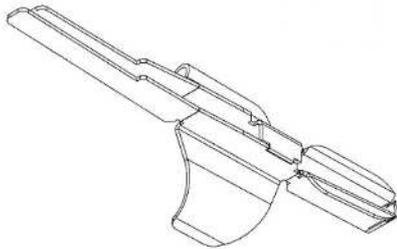

### 【使用目的、効能又は効果】

本製品は、L43Kプローブに装着し、L43Kプローブの逆方向把持性を向上させることを使用目的とする。


### 【操作方法又は使用方法等】

本製品は富士フィルムヘルスケア株式会社製、販売名：L43Kプローブ、医療機器認証番号：226ABBZX00095000に装着して使用する。

- ・装着方法



プローブの既存突起に引っ掛けて足①と足②を広げる

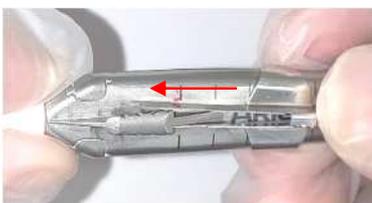

平行にして差し込む



足①が既存突起の傾斜と一致したところでばちんとはまる

- ・使用方法



フェネストレイト鉗子で突起部を挟んで使用する

- ・取外方法



足①を指などで広げる



そのまま引き抜く

より詳しい装着・取外方法は、  
以下ホームページを参照してください。

<https://www.sanmatsu.com/mm-001/>

### 【使用上の注意】

- ・本品は富士フィルムヘルスケア株式会社製 L43K プローブ（認証番号 226ABBZX00095000）に装着して使用するよう設計されているので、他の製品に装着しないこと。
- ・使用する光源・遠隔カメラの組み合わせによっては、本品を使用することによってハレーションを起こすことがある。オペレーションの妨げになる場合には、すみやかに使用を中止すること。
- ・本品を鉗子等で把持しているときに、別の鉗子等でプローブ本体またはプローブケーブルに触れないこと。また、プローブケーブルを強く牽引しないこと。意図せず強い負荷が掛かり、本品が破損またはブ

ローブから脱落する恐れがある。

- ・本品は未滅菌で供給されるため、使用前に必ず洗浄及び高圧蒸気滅菌を行うこと。

- ・本品の変性や劣化が生じるおそれがあるため、135℃を超える温度を加えないこと。

- ・使用後は汚染及び感染に注意し、本品を適切に廃棄すること。

#### 【貯蔵・保管方法】

- ・高温または湿度の高い場所や、直射日光、紫外線の当たる場所は避け、清浄な状態で保管すること。

- ・水ぬれに注意して保管すること。

- ・本品の有効期限は出荷後5年間とする。

#### 【包装】

3個／箱

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社 SANMATSU

住所：福岡県筑紫野市岡田3丁目10番9号

電話番号：092-926-4711

製造業者：株式会社 SANMATSU