

医療用品 04 整形用品
一般医療機器 医療ガーゼ 13700000

再使用禁止

QuikClot カオリンシール

【禁忌・禁止】

再使用禁止

凝固系疾患の患者には用いないこと。[安全性が確認されていないため]

ヘパリンナトリウム、塩酸クロピドグレル、ワルファリンカリウム以外の抗凝固剤を使用中の患者には用いないこと。[安全性が確認されていないため]

【形状・構造及び原理等】

1. 概要

本品は合成繊維からなる滅菌済み不織布ガーゼで、単回使用である。

2. 形状・構造

寸法等の違いにより以下の製品がある。

型番	製品名	寸法等
467Z	QuikClot カオリンシール QCI※1	3.8cm×3.8cm 
631	QuikClot カオリンシール QCI (スリットあり)※1	3.8cm×3.8cm 
374	QuikClot カオリンシール Radial※2	2cm×4cm (ロール) 
475	QuikClot EMS ロールガーゼ	7.5cm×1.2m (ロール) 
473	QuikClot EMS カオリンガーゼ 4×4	10cm×10cm 

※1：販売名「テガダームト ランスペアレント ドレッシング」（承認番号：20400BZY00983000、申請者：スリーエムヘルスケア株式会社と併用し固定することもある。

※2：以下の付属品の DP ドレッシングと併用し圧迫固定することもある。



3. 主な材料

不織布ガーゼ	レーヨン
	ポリエステル
	グリセリン
	カオリン
	精製水

【使用目的又は効果】

本品は、局所出血部位、又はバスキュラーアクセスの刺入部位の出血の抑制、液の吸収のために用いる。

【操作方法又は使用方法等】

QuikClot カオリンシール QCI



①無菌操作で本品をパッケージから取り出す。本品を生理食塩液等で濡らさないこと。



②本品を12Frまでのカテーテル及び7Frまでのシース等を用いたバスキュラーアクセス刺入部に当て、施設の標準ケアに従い少なくとも5分又は止血を確認するまで圧迫する。



③圧迫部位から本品がずれないように注意し、テガダームト ランスペアレント ドレッシング又は同等の粘着性透明創傷・被覆材で固定する。



④本品は24時間までは適用することができる。取り除く際は皮膚の損傷に注意すること。

QuikClot カオリンシール QCI (スリットあり)



①無菌操作で本品をパッケージから取り出す。本品を生理食塩液等で濡らさないこと。



②本品を12Frまでのカテーテル及び7Frまでのシース等を用いたバスキュラーアクセス刺入部に当て、施設の標準ケアに従い少なくとも5分又は止血を確認するまで圧迫する。




③圧迫部位から本品がずれないように注意し、テガダームト ランスペアレント ドレッシング又は同等の粘着性透明創傷・被覆材で固定する。



④本品は24時間までは適用することができる。取り除く際はカテーテル類の抜去、皮膚の損傷に注意すること。

QuikClot カオリンシールRadial

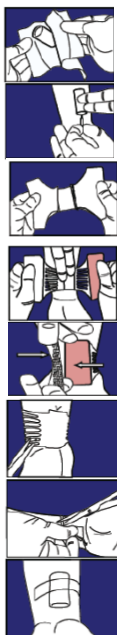

- ① 無菌操作で本品をパッケージから取り出す。本品を生理食塩液等で濡らさないこと。
- ② 本品を12Frまでのカテーテル及び7Frまでのシース等を用いたバスキュラーアクセス刺入部に押し当てシースを抜去し、圧迫固定するまでの間、圧迫止血を行う。
- ③ 付属のDP ドレッシング又は同等の圧迫固定用のドレッシングで圧迫固定を行う。
- ④ 必要に応じての圧迫固定は、介助者と共に実施する。
- ⑤ 以下DP ドレッシングの圧迫固定について説明する。同等の圧迫固定用のドレッシングを用いた場合はその使用方法に従うこと
- ⑥ 少なくとも30分は圧迫固定用のドレッシングを使用し、以後30分で段階的に除圧する。
- ⑦ 圧迫固定開始から1時間後を目安に完全に除圧する。
- ⑧ 圧迫固定用のドレッシングを取り除いた後も、本品はテープ等で固定し適用から24時間まで適用することができる。

QuikClot EMS ロールガーゼ



- ① 本品をパッケージから取り出す。
- ② 出血部位に本品を当て、圧迫する。出血が多い場合は本品を複数使用することも可能である。
- ③ 少なくとも3分又は止血を確認するまで圧迫する。
- ④ 包帯等を巻き、軽く圧迫する。救急外傷で洗浄前の創に用いた場合は、本品を取り除いた後、創部を洗浄する。

QuikClot EMS カオリンガーゼ 4×4



- ① 本品をパッケージから取り出す。
- ② 出血部位に本品を当て、圧迫する。出血が多い場合は本品を複数使用することも可能である。
- ③ 少なくとも3分又は止血を確認するまで圧迫する。
- ④ 包帯等を巻き、軽く圧迫する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

本品が眼と接触しないよう注意すること。[安全性が確認されていないため]

高血圧や抗凝固剤による治療を受けている患者に本品を用いて圧迫止血する際は、より長い圧迫時間を必要とすることがある。

2. 相互作用

1) 併用禁忌（併用しないこと）

医療機器の名称等	臨床症状措置方法	機序・危険因子
ヘパリンナトリウム、塩酸クロピドグレル、ワルファリンカリウム以外の抗凝固剤	本品を安全に使用できない可能性があるので併用しないこと	本品と併用したときの安全性が確認されていない

【保管方法及び有効期間等】

貯蔵方法：

QuikClot カオリンシール QCI 及び
QuikClot カオリンシール Radial は、
高温、多湿、直射日光を避け保管。温度：25℃以下にて保管。

QuikClot EMS ロールガーゼ及び

QuikClot EMS カオリンガーゼ 4×4 は、
高温、多湿、直射日光を避け保管。

有効期間：

QuikClot EMS ロールガーゼ及び QuikClot EMS カオリンガーゼ 4×4 は、3年
QuikClot カオリンシール QCI 及び QuikClot カオリンシール Radial は、2.7年
(自己認証データによる)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>
サージテック株式会社

<製造業者>
Z-Medica, LLC
(アメリカ)