

医療用品 04 整形用品  
一般医療機器  
X線造影材入りガーゼ 32374000  
**QuikClot X-ray カオリンシール**

再使用禁止

**【禁忌・禁止】**

再使用禁止

凝固系疾患の患者には用いないこと。[安全性が確認されていないため]

ヘパリンナトリウム、塩酸クロピドグレル、ワルファリンカリウム以外の抗凝固剤を使用中の患者には用いないこと。[安全性が確認されていないため]


本品を傷口に詰めたまま閉創しないこと。[体内遺残するため]

**【形状・構造及び原理等】**

1. 概要

本品は合成繊維からなる滅菌済みX線造影系入不織布ガーゼで、単回使用である。

2. 形状・構造

型番	製品名	寸法等
458	QuikClot カオリンシール 2×2	5cm×5cm 
459	QuikClot カオリンシール 4×4	10cm×10cm 
460	QuikClot トラウマパッド	30cm×30cm（ひも付き） 
461	QuikClot カオリンロールガーゼ	7.5cm×3.7m（ロール） 
487	QuikClot カオリン Z フォイルガーゼ	7.5cm×3.7m（Z折） 
* 200, 2010 / 350	QuikClot コンバットガーゼ ZF / QuikClot コンバットガーゼ LE	7.5cm×3.7m（Z折） 
345	QuikClot コンバットガーゼ XL	10.2cm×3.7m（2層Z折） 

主な材料

不織布ガーゼ	レーヨン
	ポリエステル
	グリセリン
	カオリン
X線造影系	精製水
	硫酸バリウム
ひも	ポリプロピレン/ポリエステル
	コットン

**【使用目的又は効果】**

本品は、局所出血部位、外科切開部位等の出血の抑制、液の吸収のために用いる。

**【操作方法又は使用方法等】**

QuikClot カオリンシール 2×2

QuikClot カオリンシール 4×4

QuikClot トラウマパッド

QuikClot カオリンロールガーゼ

QuikClot カオリン Z フォイルガーゼ



①本品をパッケージから取り出す。



②本品を出血部位に当て、圧迫止血する。本品は傷口に詰めることもできる。



③少なくとも5分又は止血が収まるまで圧迫する。



④本品は24時間までは適用することができる。取り除く際に本品が固着している場合は、生理食塩液等で湿らせて取り除くこと。本品を取り除いた後、生理食塩液等で創部を洗浄する。

QuikClot コンバットガーゼ ZF

QuikClot コンバットガーゼ LE

QuikClot コンバットガーゼ XL



①本品をパッケージから取り出す。



②本品を出血部位に当て、圧迫止血する。



③少なくとも3分又は止血が収まるまで圧迫する



④本品は24時間までは適用することができる。取り除く際に本品が固着している場合は、生理食塩液等で湿らせて取り除くこと。本品を取り除いた後は、生理食塩液等で創部を洗浄する。

## 【使用上の注意】

### 1. 重要な基本的注意

本品が眼と接触しないよう注意すること。[安全性が確認されていないため]

高血圧や抗凝固剤による治療を受けている患者に本品を用いて圧迫止血する際は、より長い圧迫時間を必要とすることがある。

### 2. 相互作用

#### 1) 併用禁忌（併用しないこと）

医療機器の名称等	臨床症状措置方法	機序・危険因子
製造業者の指定する以外の構成品	本品は製造業者が指定する構成品と組み合わせて使用するよう設計されている。正しく機能しなくなる恐れがあるので、指定外の構成品とは組み合わせて使用しないこと。	指定外の構成品との併用を想定していない。

#### 【保管方法及び有効期間等】

貯蔵方法：

QuikClot カオリンシール 2×2、QuikClot カオリンシール 4×4、  
QuikClot トラウマパッド、QuikClot カオリンロールガーゼ、  
QuikClot カオリン Z フォイルガーゼは、  
高温、多湿、直射日光を避け保管。温度：25℃以下にて保管。

QuikClot コンバットガーゼ ZF、  
QuikClot コンバットガーゼ LE、  
QuikClot コンバットガーゼ XL は、  
高温、多湿、直射日光を避け保管。

有効期間：3年（自己認証データによる）

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

サージテック株式会社

<製造業者>

Z-Medica, LLC

(アメリカ)