

機械器具 11 放射線障害防護用器具
一般医療機器 放射線防護用術者向け眼鏡 (38884000)

AADCO X 線防護眼鏡

【禁忌・禁止】

使用方法

- ・防護レンズおよびフレームに損傷、又は損傷のおそれがある場合は使用しないこと。
[正常な放射線遮断性能が保たれていない可能性がある]

【形状・構造及び原理等】

<形状>



レンズの鉛当量：0.6mmPb
サイドシールドの鉛当量：0.25mmPb

<原理>

放射線を減衰する元素を含有したレンズを使用した眼鏡を着用することにより、放射線の散乱線から眼球を保護する。

【使用目的又は効果】

診断や治療のための医科/歯科処置に伴う散乱放射線による不必要な被曝から術者や他の人員の眼を保護する。

【使用方法等】

1. 着用前に防護レンズ及びフレームに傷や割れ等の損傷がないかを目視、触覚等で確認すること。
2. ヘッドバンドを眼鏡の左右の先端部に装着する。
3. 眼鏡を顔面に密着させ、眼鏡が落ちないように装着する。
4. ヘッドバンドを頭囲に合わせ締め付け、固定する。

【使用上の注意】

1. 本品が損傷したり、顔面に密着しない場合は、使用しないこと。
2. 落下や転倒などによる衝撃加わった場合には、直ちに使用を中止し点検すること。
3. フレームを無理に広げるとレンズ外れ、本品にヒビが入るおそれがあるので、フレームを無理に広げ使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光、高温多湿を避け、放射線防護レンズに傷がつかないように保護ケースに入れて保管すること。

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

- ・日常の始業・終業時に防護レンズ及びフレームに傷や割れ等の損傷がないかを目視、触覚等で点検を行うこと。
- ・曇り止めレンズクリーナーを眼鏡拭きに含ませ清浄に保つことを推奨する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

サンタメディカル株式会社

〒174-0072

東京都板橋区南常盤台一丁目11番7号 MTビル302

TEL：03-5926-9520

製造業者：

AADCO Medical Inc. (アメリカ合衆国)

AADCO Medical Asia-Pacific Ltd. (中国(香港))