

歯 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 JMDN 70903000

セラポイント

【形状、構造及び原理等】

1. 形状

HP 用及び CR 用シリコンポイント



・グレー:中研磨 ・ピンク:仕上げ研磨

2. 原材料

作業部:ゴム基材で結合された研磨成分をから成るシリコン

シャंक部:ステンレススチール

【使用目的又は効果】

ゴム基材で結合された研磨成分から成るポイント形状のゴム製研磨材で、
義歯レジン床、金属、ポーセレンなどの研磨に用いる。

【使用方法等】

歯科用ハンドピースに装着し、通常の研削行程に適用する。

※適正回転数:10,000rpm 以下

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

適正回転数を超えた使用をしないこと。

【使用上の注意】

1. 使用前に予備回転を実施し、ブレが無いことを確認すること。
2. 目の損傷を防ぐため、保護メガネなどを使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 粉塵や化学薬品を避け、適切に保管すること。
2. 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 ザイコインターナショナル株式会社

電話番号 03-6457-8379

<https://ziecor.jp>

製造業者 Edenta Etablissement

国名 リヒテンシュタイン