

歯 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 JMDN 70903000

セラホイール

【形状、構造及び原理等】

- 形状
軸なしシリコンホイール



・グレー:中研磨(直径17mm) ・ピンク:仕上げ研磨(直径12mm)

- 原材料
ゴム基材で結合された研磨成分をから成るシリコン

【使用目的又は効果】

ゴム基材で結合された研磨成分から成るホイール形状のゴム製研磨材で、歯科用マンドレールに装着し、義歯レジン床、金属、ポーセレンなどの研磨に用いる。

【使用方法等】

歯科用ハンドピースに装着し、通常の研削行程に適用する。

※適正回転数:20,000rpm 以下

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

適正回転数を超えた使用をしないこと。

【使用上の注意】

- 使用前に予備回転を実施し、ブレが無いことを確認すること。
- 目の損傷を防ぐため、保護メガネなどを使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 粉塵や化学薬品を避け、適切に保管すること。
- 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 ザイコインターナショナル株式会社

電話番号 03-6457-8379

<https://ziecor.jp>

製造業者 Edenta Etablissement

国名 リヒテンシュタイン