

機械器具 39 医療用鉗子
一般医療機器 歯科技工用鉗子 JMDN70935000
テレスコープクラウンプライヤー

【形状・構造及び原理等】



材質:ステンレス鋼、塩化ビニール

【使用目的又は効果】

歯科技工用コーヌスクラウン内冠の把持するための器具。

【使用方法等】

ハンドルを手指でしっかり固定し、先端部をコーヌスクラウン内冠に挿入する。先端部を開き、把持可能な位置でストッパーを使用し固定する。コーヌスクラウンの把持は先端が内冠に軽く触れる程度で把持できる為、不用意に先端を開きすぎないように注意する。

【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

- ① 上記に定めた使用目的以外の目的で使用しないこと。また、破損等の原因になり得るので必要以上の応力を加えないこと。
- ② 上記に定めた操作方法、使用方法を守り、それ以外には使用しないこと。
- ③ 破損や事故等の原因となるので、曲げ、切削、打刻等の2次加工(改造)は絶対に行わないこと。
- ④ 長期の使用により磨耗等の劣化が生じるので、適時交換すること。
- ⑤ 本品の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状があらわれた場合には、速やかに使用を中止し医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ① 本品は、湿度が高くならない場所にて保管・管理する。
[錆を防ぐため]

【使用期間】

- ① 本品を使用中に破損などのおそれのある場合には、直ちに使用を中止し、新しいものと交換すること。

【保守・点検に係る事項】

- ① 「もらい錆」を防ぐため、錆びている器具と一緒に保管しないこと。また、化学薬品といっしょに収納・保管しないこと。
- ② 水分等付着した場合は、腐食を防ぐために保管期間の長短にかかわらず乾燥すること。防錆潤滑油を塗付する事を推奨する。
- ③ 使用前に、汚れ、傷、曲がり、破損等に異常がないか点検をすること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元・製造元 株式会社 シオダ
電話番号 0287-88-2288