


機械器具67 歯科用防湿器
 一般的名称 歯科用ラバーダムフレーム JMDN31849000

小児用ラバーダムフレーム

【形状・構造及び原理等】

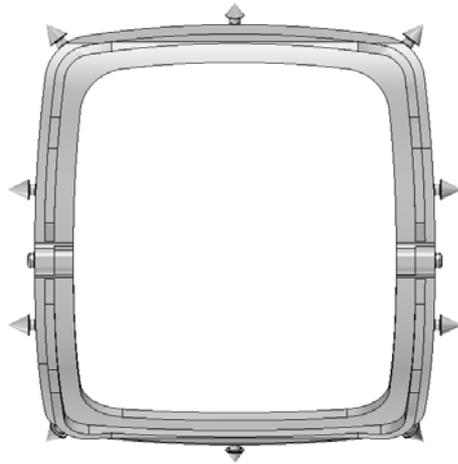

材質:POM(ポリアセタール)樹脂,ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

歯科用ラバーダムフレーム術野に到達しやすくするためにラバーダムを延伸した状態で保持する柔軟なフレームをいう。

【使用方法等】

- ① 通法に基づき患歯にかけられたラバーを広げ、フレーム外周の突起(爪)にラバーを引っかけラバーを張る。

※使用方法の詳細は別紙使用説明書を参照の事。

【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

- ① 上記に定めた使用目的以外の目的で使用しないこと。また、破損、曲がり等の原因になり得るので必要以上の応力を加えないこと。
- ② 上記に定めた操作方法、使用方法を守り、それ以外には使用しないこと。
- ③ 破損や事故等の原因となるので、曲げ、切削、打刻等の2次加工(改造)は絶対に行わないこと。
- ④ 長期の使用により金属疲労や磨耗等の劣化が生じるので、適時交換すること。
- ⑤ 購入時は未滅菌のため、使用前に必ず洗浄・滅菌を行い、次回からの使用時にも同様に行うこと。
- ⑥ 本品は、常に滅菌後の汚染に注意し、手指、未滅菌の器具などで直接触れないこと。
- ⑦ 本品は、使用前に必ず患者の口腔外にて、汚れ、傷、曲がり、破損等、性能、使用目的上支障がないことを確認すること。
- ⑧ 使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液や精製水に浸漬すること。
- ⑨ 塩素系及びヨウ素系の消毒液は、腐食の原因になるので使用を避けること。使用中に付着したときには直ちに洗い流すこと。
- ⑩ 腐食(錆)の原因となるので、次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ポビドンヨード、ホルマリン、フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン、超酸性水、家庭用洗剤等は使用しないこと。
- ⑪ 本品の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状があらわれた場合には、速やかに使用を中止し医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- ① 本品は、清潔な場所にて保管・管理する。[汚染等を防ぐため]
- ② 本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理する。

【使用期間】

- ① 本品を使用中に破損又は汚染した恐れのある場合には、すぐに使用を中止し、新しいものと交換すること。

- ② 洗浄、滅菌又は着脱の繰り返しによる摩耗などによって劣化してきた場合には、新しいものと交換すること。

【保守・点検に係る事項】

- ① 高圧蒸気滅菌は精製水を使用し、115～118℃で30分、121～124℃で15分、126～132℃で10分、いずれかの条件で行なうこと。なお、滅菌の為のセット・包装にあたっては、確実に滅菌できるよう配慮すること。
- ② オートクレーブ内での乾燥は高温のため急速に劣化させる可能性があるために行わないこと。
- ③ 薬剤等を使用した滅菌は急速に劣化させる可能性があるため、使用しないこと。
- ④ 紫外線殺菌灯は劣化させる可能性があるため使用しないこと。
- ⑤ 術後は使用、未使用にかかわらず洗浄、滅菌を行うこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元・製造元 株式会社 シオダ

発売元 クロスフィールド株式会社
 住所 東京都墨田区江東橋1-3-6
 電話番号 03-5625-3306
 FAX番号 03-3635-1060