

機械器具 36 医療用ピンセット
一般医療機器 ピンセット（35079001）

磁性アタッチメント用ピンセット

【形状・構造及び原理等】

形状：



材質：純チタン

【使用目的又は効果】

保持する物体を閉じて挟む 2 枚の刃をもつ手術器具をいう。

【使用方法等】

診療および技工作業時における、磁性アタッチメントの把持に使用します。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- ①本品の使用に際しては、血液の飛沫などによる人体への影響を避けるため、公的機関が認可した防塵マスク、保護めがねなどを着用すること。

【使用上の注意】

1) 使用注意（次の患者には慎重に適用すること）

- ①本品に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は、本品を使用しないこと。また、使用により過敏症状を起こしたときは、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けること。

2) 重要な基本的注意

- ①購入時は未滅菌のため、使用前に必ず洗浄・滅菌を行い、次回からの使用時にも同様に行うこと。
- ②本品は、常に滅菌後の汚染に注意し、手指、未滅菌の器具などで直接触れないこと。
- ③本品は、使用前に必ず患者の口腔外にて、破損などの支障がないことを確認すること。
- ④本品の口腔内での使用の際は、磁石構造体などを落下させ、誤飲させないように取り扱いには充分注意すること。
- ⑤本品を使用中に、破損又は汚染した恐れのある場合には、すぐに使用を中止し、新しいものと交換すること。
- ⑥本品を使用中に患者の口腔内又は顔面、術者の手指などを傷つけないように取り扱いには充分注意すること。
- ⑦腐食（錆）の原因となるので、洗浄の際、磨き粉や金属ウール・金ブラシ・ヤスリ等の鋼製工具を使用しないこと。
- ⑧塩素系及びヨウ素系の消毒液は、腐食の原因になるので使用を避けること。使用中に付着したときには、直ちに洗い流すこと。
- ⑨消毒用薬液及び洗浄剤の濃度、浸漬時間、温度などの使用方法は、各メーカーの指示に従い、正しく使用すること。腐食（錆）の原因となるので、塩素系薬液（次亜塩素酸ナトリウムなど）、過酸化水素系薬液（オキシドール）、強酸性水、及び防錆効果のない界面活性剤系薬液（塩化ベンゼトニウム液、塩化ベンザルコニウム液、両性界面活性剤など）は使用しないこと。
- ⑩滅菌は、オートクレーブ、ケミクレーブ又はEOGで行うこと。なお、乾熱滅菌は、高温になり劣化の原因になるので使用しないこと。
- ⑪オートクレーブ滅菌の場合には、器種・条件によっては、滅菌バッグが湿った状態で乾燥工程が終了することがあり、その際、本品と滅菌バッグとが直接接触していると錆が発生する原因となるので、接触しないようにすること。

- ⑫滅菌後は錆などがないか点検し、錆などが認められた場合には使用しないこと。

- ⑬錆、変色などの恐れがあるため、以下のことについて留意すること。

- ・血液・唾液等付着したまま乾燥させないこと。
- ・最終洗浄は、精製水を使用すること。
- ・湿度が高くて自然乾燥に時間を要する場合には、ドライヤーなどで強制的に乾燥させること。
- ・汚れ、水分、洗浄剤などが付着したまま滅菌しないこと。
- ・オートクレーブ滅菌の場合には、精製水を用い、水道水は使用しないこと。

- ⑭本品使用後は、すぐに消毒用薬液（上記⑧参照）又は消毒効果及び防錆効果のある洗浄剤に浸漬し、その後、超音波洗浄器、ブラシなどを用いて洗浄し、先端部などの付着物を完全に除去すること。

- ⑮術後は、使用・未使用にかかわらず所定の消毒・洗浄・滅菌を行うこと。

- ⑯本品の形態変更、改造などをしないこと。

- ⑰長期の使用により金属疲労や磨耗等の劣化が生じるので、適時交換すること。

- ⑱本品は、【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。

- ⑲本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・本品は、錆、変色を防ぐため、清潔で室温の乾燥した場所に保管する。
- ・本品は、錆びる恐れがあるため、水分が付着したまま保管しない。保管期間の長短にかかわらず、乾燥後、防錆潤滑油を塗付する事を推奨する。
- ・血液、体液、組織及び薬品等が付着したまま保管しない。
- ・本品は、「もらい錆」を防ぐため、錆びている器具と一緒に保管しない。また、化学薬品といっしょに収納・保管しない。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社 シオダ
住所：〒321-0517
栃木県那須烏山市東原 53 番地

発売元：株式会社ジーシー
住所：〒113-0033
東京都文京区本郷 3 丁目 2 番 14 号
電話番号：（お客様窓口）0120-416480