


機械器具 6 5 歯科用充填器
一般医療機器 歯科用根管プラグ（41876000）
ジーシー NEX G-コンデンサー

【形状・構造及び原理等】

1）形状：歯科用ハンドインストルメント

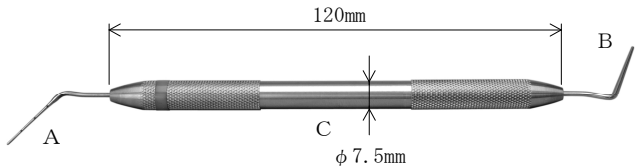

《寸法》

種類	先端サイズ[mm]		色別
	A	B	
#35/#70	0.35	0.70	緑
#40/#80	0.40	0.80	黒
#50/#100	0.50	1.00	黄
#60/#120	0.60	1.20	青

2）構造等

《材質》

構成部位		材質
A	作業部	ニッケルチタン
B	作業部	ステンレス
C	ハンドル	ステンレス

3）原理

本品は根管に充填物を充填、圧接する。

【使用目的又は効果】

根管に充填物を軸方向に充填、または側方向に圧接するために用いる。

【使用方法等】

- 購入時は未滅菌のため、使用前に必ず洗浄・滅菌を行い、次回からの使用時にも同様に行います。滅菌は、オートクレーブ、EOG、又は薬剤にて行います。[オートクレーブは 115～118℃で 30 分、121～124℃で 15 分、126～132℃で 10 分、134℃で 3 分のいずれかの条件（日本薬局方、ISO17665 等に準拠）で行います。EOG 及び薬剤は、各製造業者の指示に従って使用します。] ただし、乾燥工程が 135℃を超えてしまう場合は、乾燥工程を省きます。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 本品は、常に滅菌後の汚染に注意し、手指・未滅菌の器具などで直接触れないこと。また、唾液に触れないこと。
- 破折の原因になるので、無理な角度や力で操作しないこと。

【使用上の注意】

- 使用注意（次の患者には慎重に適用すること）
 - ①本品の使用により、発疹などの過敏症を起こした患者には使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。
 - ②本品に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は、本品を使用しないこと。また、使用により過敏症状を起こしたときは、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けること。
- 重要な基本的注意
 - ①本品は、使用前に必ず口腔外にて、傷・バリなどがないことを確認すること。
 - ②本品は、先端が鋭いため、使用中に患者の術部以外の口腔内、顔面、術者の手指などを傷つけないように取り扱いには充分注意すること。

- ③本品に異常がないことを絶えず監視すること。また、異常が発見された場合は、速やかに本品の使用を中止するなど、適切な措置をとること。
- ④本品は、作業部の超弾性の性質が変質する恐れがあるので、火焰等であぶらないこと。
- ⑤消毒用薬液及び洗浄剤の濃度・浸漬時間・温度などの使用方法は、各メーカーの指示に従い正しく使用すること。
- ⑥次の成分を含む消毒用薬液は、錆への影響が高いので使用しないこと。
 - ・塩素系薬液（次亜塩素酸ナトリウムなど）、過酸化水素系薬液（オキシドールなど）、強酸性水、及び防錆効果のない界面活性剤系薬液（塩化ベンゼトニウム液、塩化ベンザルコニウム液、両性界面活性剤など）。
- ⑦乾熱滅菌は、高温になり劣化・変色の原因となるので使用しないこと。
- ⑧オートクレーブ滅菌の場合、機種・条件によっては滅菌バッグが湿った状態で乾燥工程が終了することがあり、その際、滅菌バッグと直接接していると錆が発生する原因となるので、確実に乾燥させること。
- ⑨滅菌後は錆がないか点検し、錆が認められた場合には、新しいものと交換すること。
- ⑩錆びる恐れがあるため、次のことについて留意すること。
 - ・血液などが凝固付着したまま乾燥させないこと。
 - ・最終洗浄は精製水を使用すること。
 - ・湿度が高くて自然乾燥に時間を要する場合には、ドライヤーなどで強制的に乾燥させること。
 - ・汚れ、水分、洗浄剤などが付着したまま滅菌しないこと。
 - ・オートクレーブ滅菌の場合、精製水を用い、水道水は使用しないこと。
- ⑪本品使用後は、すぐに抗菌効果及び防錆効果のある洗浄剤に浸漬し、その後、超音波洗浄器、ブラシなどを用いて洗浄し、先端部などの付着物を完全に除去すること。洗浄剤としては、酵素系洗浄剤（ハイジーンウォッシュなど）を使用すること。
- ⑫本品は、清掃時にワイヤーブラシ・ヤスリなどの鋼製工具を使用しないこと（錆の発生、破損、性能・品質などの低下に繋がります）。
- ⑬事故・破損などの原因になるので、細工加工は行わないこと。
- ⑭誤って床に落としたり、異常な衝撃を与えたりすると、先端部の損傷などで、本来の機能が発揮できなくなることがあるので注意すること。
- ⑮本品は、【使用目的又は効果】に記載の用途以外には使用しないこと。
- ⑯本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・本品は錆びる恐れがあるため、水分が付着したまま保管しないこと。
- ・本品は、湿度の高い場所に長時間保管すると錆びる恐れがあるので、乾燥した場所に保管すること。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社シオダ
住所：〒321-0517
栃木県那須烏山市東原 53 番地

発売元：株式会社ジーシー
住所：〒113-0033
東京都文京区本郷 3 丁目 2 番 14 号
電話番号：（お客様窓口）0120-416480